

MOGU® 介護使用案 カタログ

MOGU®は、ご家族みなさんに使っていただきたい商品です。

笑顔・気持ちよさは、健康の必需品。



家族みんなが“気持ちいい”MOGU®は、
おじいちゃん、おばあちゃんも“気持ちいい”。



家族みんなが“気持ちいい”MOGU[®]は、 家族みんなが“笑顔”になれる。

笑顔・気持ちよさは、健康の必需品。



家事や介護でがんばっているお母さん
毎日仕事でいそがしいお父さんには...、

腰痛を緩和・予防する

「MOGU. 背すじをのばす8の字クッション」が
(一般名: バックサポーターエイト)

車イスのおじいちゃんも、
きっと気持ちがいいですよね。

子どもたちにも大人気の
「もぐっち[®] キャラクタークッション」...

犬好き・猫好きの
おじいちゃん、おばあちゃんも
きっと喜んでくれるはず！



睡眠は心と体のリフレッシュ。

「MOGU. 気持ちいい抱きまくら」が
癒してくれる...。

体圧を分散し体を支えてくれるので
おじいちゃん、おばあちゃんの
床ずれ予防にも効果的。

飛行機やバスでの旅行時に便利な
「MOGU. ネックピロー」…



車イスでの散歩の時も首を支えてくれるので
おじいちゃん、おばあちゃんにも快適！



長く座っての仕事だと、
お尻の尾骨がいたくなるよね。

そんなときは
「MOGU. 尾骨を浮かすシートクッション」…

お尻が痩せて尾骨があたる
おじいちゃん、おばあちゃんも
喜んでくれるはず！！



MOGU. クッションは
「浮輪」のように水に浮きます！

比重の小さい素材からなるMOGU.パウダービーズ®が
持つ浮力によって、津波などの水害の防災に非常時応用し、
「浮輪として使うことができます」

パウダービーズ®は独立気泡体で、95%以上空気でできている
ため、ビーズ内に水が染み込まず浮力を得ることができます

※防災用具として認定を受けている製品ではありません



MOGU. はインテリア機能系クッションとして、多くの皆さんに愛用されています。

全国の東急ハンズ・ロフト・イオン・イトヨー・カ堂などの量販店、介護用品店、またはインターネットからでもご購入いただけます。

MOGU 介護用提案カタログ

- MOGU[®]の機能性 P. 6 ~15
- 介護用クッションとしてのMOGU[®] P.16~21
- 緊急時 MOGU[®]クッションは「浮輪」のように水に浮きます! P.22・23
- セットアップのご提案 P.82~87
- 製品の取り扱いについて P.88・89
- よくあるお問い合わせ 卷末



座る



MOGU[®]
ウェストクッション
P.24~27



新
MOGU[®]
スワッテ瞬間美姿勢フィット
P.28・29



MOGU[®]
尾骨を浮かすシートクッション
P.30・31



MOGU[®]
ひっぱって使うのびるシートクッション
P.32・33



新
MOGU[®]
姿勢体幹サポーターエイト
P.34・35



新
MOGU[®]
背すじをのばす8の字クッション
P.36・37



MOGU[®]
腰を楽にするクッション
P.38・39



MOGU[®]
ネックピロー
P.40・41

寝る



新
MOGU[®]
プレミアム家族の健康まくら
P.42~45



新
MOGU[®]
家族の健康まくら
P.46~49



MOGU[®]
気持ちいい抱きまくら
P.52・53



MOGU[®]
体圧分散に優れた四角いクッション
P.54・55



MOGU[®]
ポジショニングに便利な筒型クッション
P.56・57



MOGU[®]
体位変換に使いやすい筒型クッションロング
P.58・59

もたれる 支える 受け止める



MOGU®
体にフィットする穴あき枕
P.60・61



MOGU®
いろいろ便利な穴あきクッション
P.62・63



MOGU®
小さく便利な穴あきパッド
P.64・65



MOGU®
すきまをうめる多用途クッション
P.66・67



MOGU®
頭と上半身を支えるクッション
P.68・69

補助 温める



MOGU®
癒しの触感クッション
P.70・71



MOGU®
筆記具&食事用グリップ
P.72・73



MOGU®
ネックウォーマー
P.76



MOGU®
イヤーウォーマー
P.77



MOGU®
おやすみあつたかくつ下
P.78



MOGU®
前だおれ防止機能付ウエストポーチ
P.79

癒し



もぐっち®み~たん
P.81



もぐっち®わんわん
P.81



もぐっち®ブ～!
P.81



MOGU®もぐピヨ
P.81



MOGU®もぐフク
P.81



MOGU®もぐペコ
P.81

MOGU[®]は


パウダービーズ[®](発泡ポリスチレン)と



パウダービーズ[®]は直径1mm以下の微細なビーズに特殊コーティングを施し流動性を高め、摩擦音を軽減しました。ビーズは主に炭素からなる物質で、無害で万一誤飲しても消化されずに排出されます。

伸縮性生地(ナイロン85%、ポリウレタン15%[※])で

※商品によって異なるものもございます。

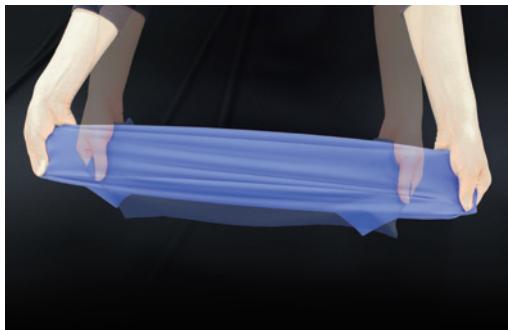

さわり心地の良さ・流動性・体圧分散性…、MOGU[®]の機能性を最大限引き出せるようオリジナルに設計された上下左右2方向に伸縮する生地です。スポーツ衣料の技術も取り入れ、吸湿速乾性にも優れています。

作られています。

MOGU[®]は、株式会社MOGUと積水化成品工業株式会社との共同研究によって開発された「安心・安全・高品質」のクッションで、特許を取得した商品です。

MOGU[®]は、よく似た商品とは一線を画すクオリティで、日本のインテリア市場で多くの皆様にご愛用頂いております。



気持ちいいだけじゃない MOGU®のチカラ





触感 (リラックス効果)

[MOGU® 心の安定効果の検証]

重度の認知症の患者には、不安興奮・奇声を出すなどの症状がみられます。その重度認知症患者3名(80歳代)に心のやすらぎを図る目的でMOGU®クッションを抱いてもらい、癒しのケアをおこなったところ、「表情が穏やかになる」「笑顔が出た」「奇声がなくなった」などの良好な結果が得られました。

[脳波検査結果]

MOGU®クッションを抱き始めた時の、「懐かしさ」「暖かさ」が感性に良い影響を与え、またMOGU®の「手触り」が触感や温感を刺激し、安心感や心地良さが得られたという報告が医療機関からありました。

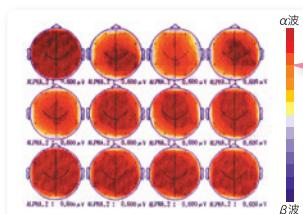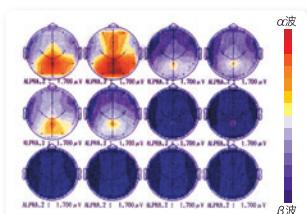


MOGU®を抱いた患者の脳波は
リラックス状態を示すα波が
強く現れている。

(株)消費科学研究所 調べ
テスト参加者:2名(20代女性) 溫度:20±2°C・55±5%RH
MOGU®背当てクッション45s使用

体圧分散

MOGU®は流動体であるパウダービーズ®と上下左右に2倍まで伸張するスパンデックスによって物体の加重面を包み込むように追従し、受圧面積が増えることによって圧力を分散する性質をもっています。

これは低反発ウレタンのような面を変形させて受ける構造とは違い、物理特性により高い体圧分散効果があります。褥瘡介護において、側位の姿勢保持のための補助具としても最適であると思われます。

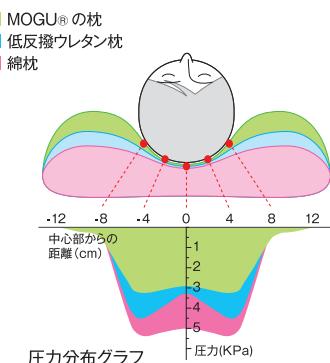


耐久性・流動性（パウダービーズ®）

発泡スチロールの圧縮強度は倍率(原料を発泡させてビーズにする倍率をいいます)が低いほど比重が高くなり、強くなる(へたりにくくなる)ことが分かっています。従来のビーズクッションは、倍率90倍(比重0.011)、直径2mm～5mmの発泡スチロールビーズでしたが、パウダービーズ®の倍率は20～40倍で直径約0.5mmと小さく、平均すると約2倍の圧縮強度があります。

また、MOGU®のパウダービーズ®はビーズ同士の摩擦係数を抑え流動性を高めるため、特殊コーティングしています。その結果、摩擦音を抑え静電気の発生も抑制する効果があります。



パウダービーズ®

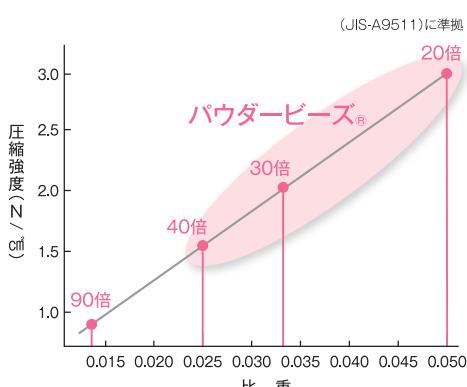

データ出所：積水化成品工業株式会社




気泡の顕微鏡写真

パウダービーズ®内部の気泡はきめ細かく均一で、気泡壁が多いことからビーズ一粒の圧縮強度も高いといえます。

保温性

パウダービーズ®の97%は空気であり、その気密性の高さと質量あたりの空気の含有量は他の素材と比べると非常に多く、高い保温性を持ちます。ネック(首)ウォーマー、タミー(腹)ウォーマーなど部分的に暖めるものからウインターワークの中材として広い範囲を暖めるのにも抜群の保温力を発揮します。

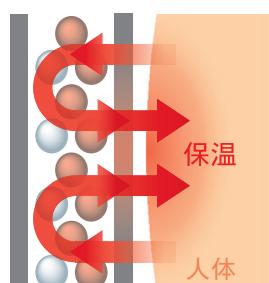

浮揚力

パウダービーズ®は、硬質の独立気泡を有する発泡体であり、97%は空気でできています。

発泡体の持つ浮揚力を利用し、例えばMOGU®商品の中で、いろいろ便利な穴あきクッションといった穴の空いたクッションを腕にとおすことで、津波など自然災害時に役立つことが期待できます。



パウダービーズ®の安全性

パウダービーズ®は、当社と積水化成品工業株式会社の共同開発により、クッション・枕・衣料用に開発した素材です。

パウダービーズ®の原料である発泡スチロールビーズは従来、工業用目的で成型をして食品保冷箱、家電緩衝材などに使われていますが、このままクッション材に転用すると発泡するのに用いる溶剤が残ってしまい刺激臭が発生します。そこで我々は日本で唯一、**2段法(ビーズを作つてから溶剤を含浸させる製法)**のプラントを持つ、**積水化成品工業(株)**と細部にわたる成分調整を行い、クッション材として残留溶剤分が他社のものに比べわめて低い(より0に近い)58ppmの素材を作ることができました。これは2段法を持つ積水化成品工業(株)だけができる製法のメリットです。そのひとつとしてパウダービーズ®はカップ麺の容器などに使用する原料を応用しており、**米国FDA(米国食品医薬品局)**の厳しい審査の中、安全性の認可を取得した唯一のクッション材です。万一、誤飲しても無害で、消化されずに排出されます。

[ビーズ他社比較]

データ出所：積水化成品工業株式会社

	製造メーカー	MOGU®	他社 国内ビーズ	他社 中国製ビーズ	人体に及ぼす影響の目安	危険有害性
溶剤分 ppm	シクロヘキサン	0	0	10,400	露長類に本化合物を1243ppmの濃度で6時間/日、50週にわたり吸入曝露した試験では異常は認められなかった	■軽度の麻酔作用 ■刺激性
	トルエン	0	53	712	100ppmで一過性の刺激、200ppmで上気道の刺激・倦怠感・知覚異常・共同運動障害、400ppmで目の刺激・流涙・興奮、600ppmで倦怠感・興奮・軽度の吐気、800ppmで鼻汁・金属臭・眠気・頭痛・倦怠感・吐気・平失調が認められる。高濃度では知覚障害・視力障害・めまい・吐気・意識消失・虚脱など	■眼・皮膚及び気道に刺激性 ■中枢神経に抑制作用
	エチルベンゼン	46	178	158	高濃度で曝露すると四肢・嘔吐・頭痛・眠気・平行感覚減少・昏睡等中枢神経系に影響がある	■目眩・嘔吐・頭痛・眠気 ■平行感覚減少・昏睡等
	クメン	0	43	30		クメンによるほとんどの遺伝毒性試験データは陰性である
	O-キシレン	12	0	30		■呼吸器刺激 ■中枢神経抑制作用
	スチレン	0	73	1,372	100ppmでは強い臭氣があるが慣れを生じやすい。 200ppm以上で眼と上部気管支に刺激作用が見られる。 200ppm～700ppmで嘔吐・吐気・頭痛・疲労・目眩が見られる。	■長期の曝露では頭痛・疲労感・吐気・目眩が起り得る ■皮膚と眼に中程度の刺激性
合 計		58	347	12,698		

●上記数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。2003年12月15日測定

他社に比べ残留溶剤分がきわめて低い

商標・製品特許 PAT 4118151・4505224

「MOGU®」および「パウダービーズ®」は株式会社MOGUの登録商標であり、世界主要国において取得済みです。また、「MOGU®」及び「パウダービーズ®」の製法製品特許は、株式会社MOGUと積水化成品工業株式会社との共同出願にて世界主要国に申請済みであり、日本及び台湾では特許取得済みです。

体形に合わせ自在に変形フィット!「もたれる」・「支

MOGU[®] パウダービーズ[®]クッションは
こんなにも腰への負担が
軽減される!

※すべて実測値であり、保証値ではありません。

[もたれる]




※自社 実測値 ※被験者2名：男性① 身長169cm・体重75kg、男性② 身長169cm・体重71kgのサンプルを基に計測 ※実測単位：荷重値(kgf)

える」・「受け止める」、**“粒動性”**体圧分散の実力。


[支える]



MOGU®気持ちいい抱きまくらを使わずに寝た状態

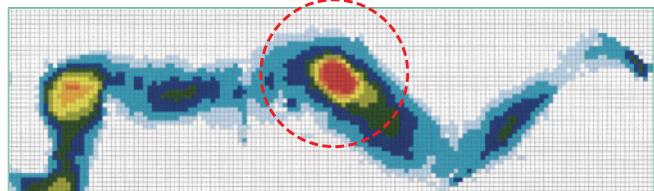

MOGU®気持ちいい抱きまくらを使用して寝た状態

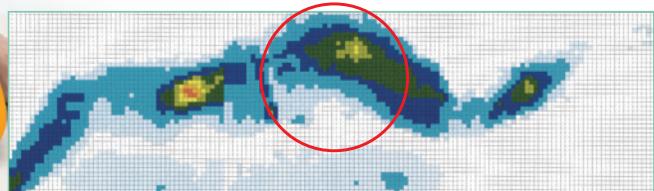

0.6未満 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0以上 (単位 : kPa)

腰への荷重
約53%
減少


クッション 不使用時 約16.3kPa ▶ MOGU® クッション 約7.6kPa

※ユニチカガーメンテック(株)調べ ※被験者：男性・身長169cm・体重75kgのサンプルを基に計測 ※実測単位：圧力値(kPa) 1kPa(キロパスカル)とは、1mあたり約102kgの重さがかかるている状態を示します。

[受け止める]



ホールクッションを使わずに座った状態

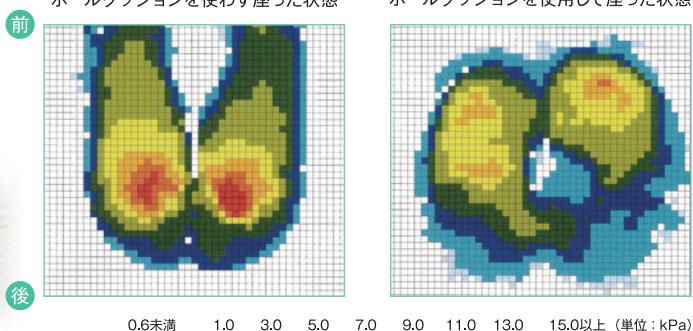

0.6未満 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0以上 (単位 : kPa)

お尻への荷重
約35%
減少

クッション 不使用時 約20.3kPa ▶ MOGU® クッション 約13.3kPa

※ユニチカガーメンテック(株)調べ ※被験者：男性・身長169cm・体重75kgのサンプルを基に計測 ※実測単位：圧力値(kPa) 1kPa(キロパスカル)とは、1mあたり約102kgの重さがかかるている状態を示します。

MOGU®のフィットカーブ設計・無圧設計に

フィットカーブ設計

人の体には様々なカーブがあります。「もたれる・座る・寝る」の動きに合わせた体のカーブによりフィットしやすい設計を施すことで、MOGU®パウダービーズクッションの“粒動性”体圧分散を高めています。



[座る]

おしりの仙骨部を浮かす



[もたれる]

背中の腰つい部に沿いS字姿勢を保つ



よって、「座る」・「寝る」がより“快適”に。

穴の空いた無圧設計

人によっては、クッションは使いたいが触れてほしくない、完全に浮かしたい体の部位があります。MOGU®パウダービーズクッションの穴の空いた製品は、高い伸縮性によって、より広い面積で受け止め、優れた体圧分散効果と同時に、一部分には圧力をかけない=無圧設計が施されています。



[寝る]

体に沿うフォルムで体重を支える

頭の形に沿い寝返りをうつても
首に負担がかかりにくい



「MOGU®」の4つの特性が、座る・寝



心をおだやかにする

触感

MOGU®クッションを抱きしめた時の、「触感」や「懐かしさ」「暖かさ」は赤ちゃんの柔肌をおもいださせます。その効果は人の心に安堵感を与え、よりリラックスした精神状態へと誘います。



圧力を分散する

柔軟性

体圧分散能力
約23%以上
増加

重さをより広い面積で
受け止めることで圧力を
分散します。

クッション不使用時
約900cm²

▼
MOGU®クッション
約1,108cm²

MOGU®は上下左右に高い伸縮性をもつ高機能スパンデックスを使用しています。この高伸縮性生地とMOGU®の特許素材パウダービーズ®によって、体圧を受け止める面積を大きく広げ凸部にかかる圧力を分散します。

前	シートクッションを使わずに座った状態
後	シートクッションを使用して座った状態

前	シートクッションを使わずに座った状態
後	シートクッションを使用して座った状態

※自社実測値 ※被験者：男性・身長169cm・体重75kgのサンプルを基に計測
※実測単位：分散面積(cm²) MOGU®非使用時との比較値(測定値は一例です)

るを“楽”に“気持ちよく”する。



発泡ウレタンとの比較時
衝撃荷重
20%以上減少

物体が落下したときの瞬間的な衝撃を
緩やかに吸収します。


発泡ウレタン使用時 ▶ MOGU_®クッション
約46kgf 約37kgf

衝撃を吸収する



流動性の高いパウダービーズ[®]と伸縮性生地の特性によって、衝撃が加わる際にビーズ同士が“粒動”することで、衝撃エネルギーを分散します。着座の際の腰や背中への負荷を和らげます。

※自社 実測値 ※厚さ50cmのクッション体に10kgのダンベルを落とした場合を計測 ※実測
単位：最大加速度(G)から算出(kgf) ※クッション体がない場合同条件で約125kgの衝撃荷重

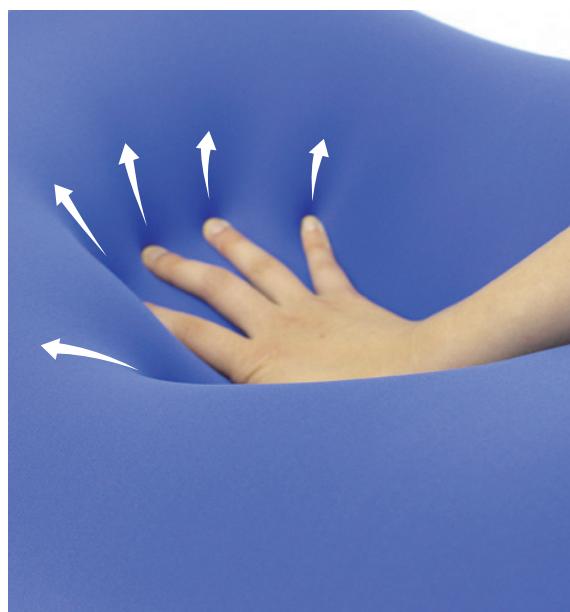

体にフィットする



MOGU_®パウダービーズクッションはクッションの持つフィットカーブ設計と生地の伸縮性、パウダービーズ[®]の“粒動”性によって、頭、背中、腰、お尻など全ての人の体のカーブにフィットします。



MOGU[®]は、
「介護用クッション」としても
さまざまなシーンで
お使いいただけます。

ご家族が入院・介護が必要になった時、
当然ベッドや車イスでの生活が長くなりますよね。
そのような時 MOGU[®]は、気持ちや体をケアサポートします。

ベッド

ベッドで同じ姿勢を長く続けると血行が悪くなり、床ずれ(褥瘡)になる可能性があるため、体位変換やクッションなどで体圧を分散する必要があります。

寝返りを打ちやすい、また身体の部位をやさしく支えるポジショニングクッションとしてご使用できます。

車イス

長時間座ったままでいると、背中や腰に疲労が溜まり、姿勢が変形するなど苦痛を伴うことがあります。背中やお尻を優しくサポートし、正しい姿勢を意識することが望されます。

身体を支持し、正しい姿勢を意識できるクッションを使って日々自発的な健康管理(セルフメディケーション)に努めることができます。

リハビリ・メンタルケア

長時間同じ姿勢を続けると手や足などがこわばり、自由に動かせなくなってしまうことがあるため、適度に動かす必要があります。また、ペットはもちろん、お花も持ち込み禁止される病院・施設もあり、患者様の癒しやリフレッシュとなるものが必要と考えます。

柔らかく、弾力がありカラフルなMOGU®クッションは癒しの心理的効果があり、ずっと触っていたい、抱いていたくなる商品です。

安価に

市販されている介護用クッションは高価なものが多く、購入されるご家族の負担が大きい。

MOGU®は15年間のインテリアクッションとしての実績のもと、お求めやすい価格で使いやすい製品を提供したいと考えています。

ご家族に喜んで使ってもらえたなら、とても嬉しく思います。




「床ずれ」とは ・ 予防対策




「床ずれ」とは?

長時間同じ姿勢で過ごす事で一定以上の圧力が同一部位にかかり続け、その部位の血行が悪くなり、皮膚やその下の組織に障害が起こることを床ずれ(=褥瘡)と呼びます。特に寝たきりやしびれ・麻痺のある患者さんに発生しやすい症状です。

床ずれの原因は単一的なものではなく、外的要因(圧力)と内的要因(加齢、低栄養、麻痺、皮膚の状態)が複合的に作用し起こるとされています。

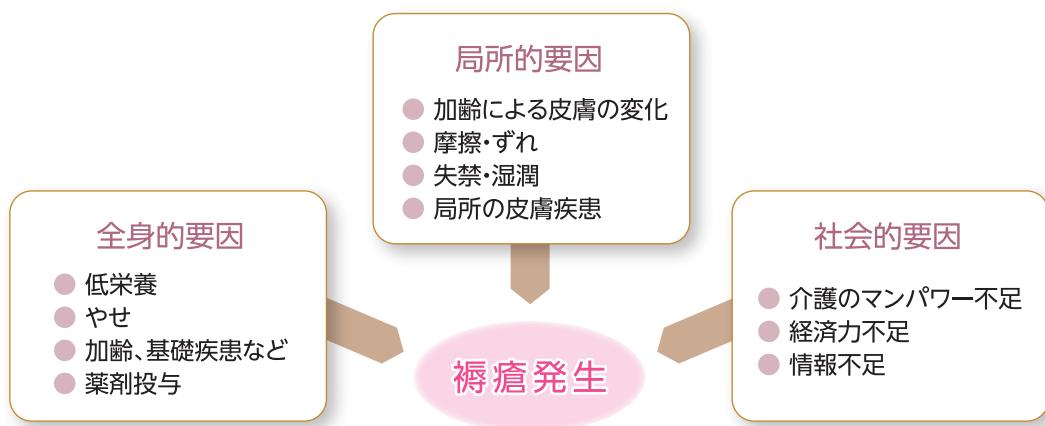

参考文献：褥瘡 ケアを知ろう～褥瘡の予防と治療～

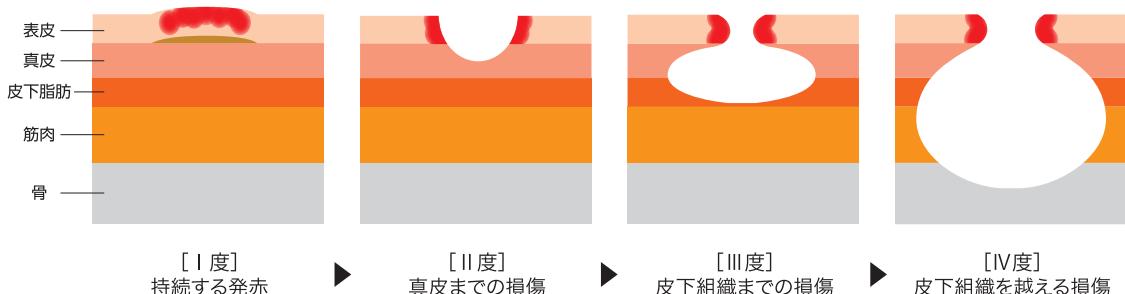


床ずれの深達度分類は多種類が発表されています。上図は日本褥瘡学会で採用されている7段階評価のDESIGN-Rの一部です。

発生部位


床ずれは骨の出ている部位(骨突出部)に出来やすく、同時にその部位には体圧が大きくかかっています。

[褥瘡の発生部位]

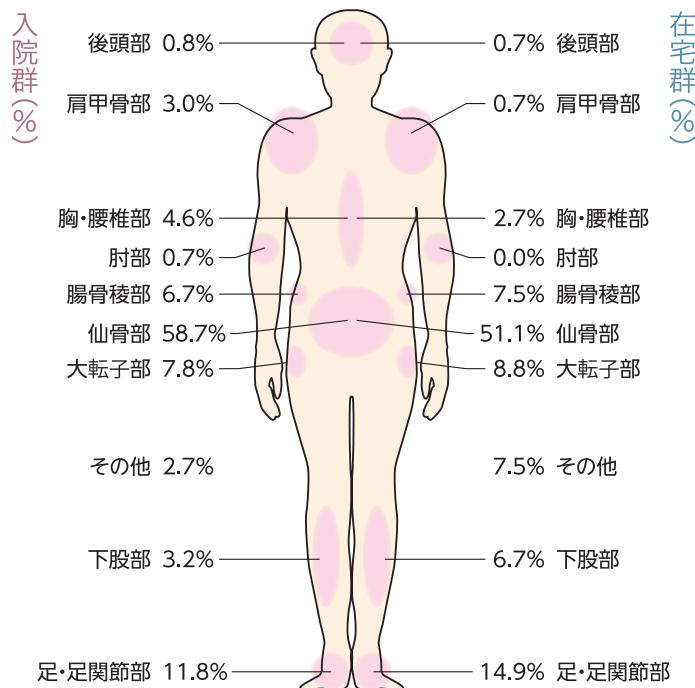


(群馬県における疫学調査による) 参考文献：褥瘡の予防・治療ガイドライン

[仰臥位による褥瘡発生部位]

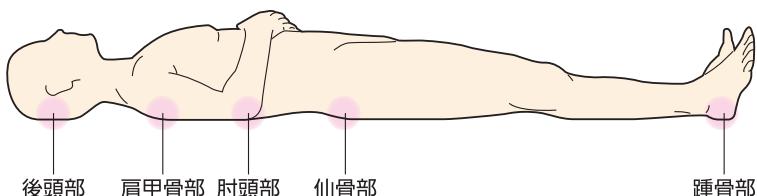

[臥位時の身体各部の重量比]

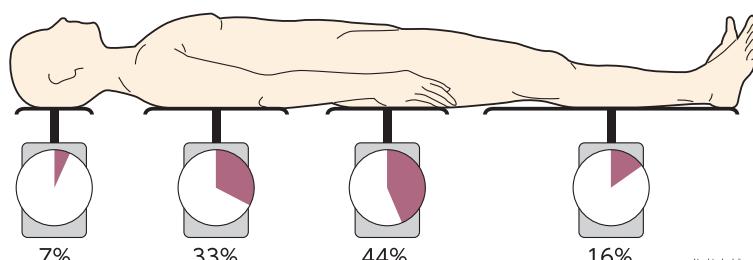

参考文献：褥瘡の予防・治療ガイドライン

予防対策

床ずれ予防には、骨突出部の圧力をいかに分散させるかが重要です。予防研究の結果、寝ている時（臥位）、座っている時（坐位）それぞれに応じて最も適切（床ずれがおきにくい）とされる姿勢が分かっています。

[臥位時の床ずれ予防]

①体位変換

原則として2時間に1回体位変換を行い、骨突出部の圧を完全に取り除く。


②30°側臥位にする

体圧を最も広い面積で受け止める事ができる30°側臥位にする。

③かかと部の除圧を行う

かかと部も床ずれ発生しやすい部位であり、体圧を分散する必要がある。

[30° 側臥位]

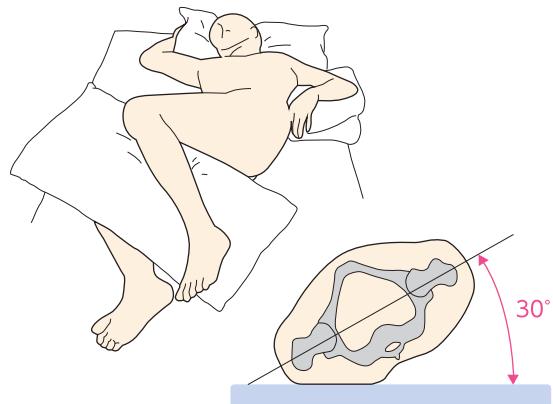


参考文献：褥瘡の予防・治療ガイドライン

⚠ 硬めの円座（ドーナツ型クッション）の使用は注意する


ドーナツ型のクッション（円座）を使用する際に、円座と接触する皮膚が引っ張られ虚血となり、除去時には踵骨上の皮膚が虚血状態になり、逆に床ずれを誘発する危険性があります。

参考文献：褥瘡の予防・治療ガイドライン

[円座使用時の踵]

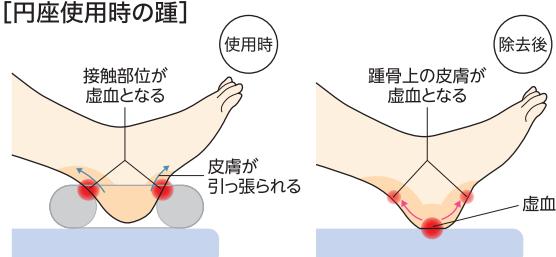

MOGU_®の穴あきクッションは、体の表面に沿って生地が伸び、パウダービーズ_®が流動して受圧面積を大きくし、体圧を分散するので皮膚が引っ張られることなく除圧できます。

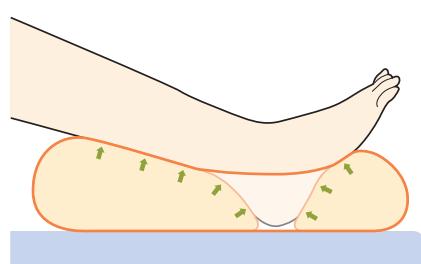

MOGU_®の提案

患者さんが自分で骨突出部にかかる体圧を取り除く能力が低下したときには、体圧分散用具が必要です。

[坐位時の床ずれ予防]

①90°ルールに即した姿勢保持

股関節90°、膝関節90°、足関節90°で座ると圧力は臀部から大腿後面へ移動します。大腿後面には骨突起がなく、かつ臀部より支持面積が広いため、床ずれ予防ができる。


②座り続ける事をしない

同じ姿勢を15分以上続けないように、臀部を浮かせる。


(自分で上体を浮かせる事ができない患者さんは、介護者の協力を得る)

参考文献：褥瘡の予防・治療ガイドライン

[90度ルールの坐位姿勢]

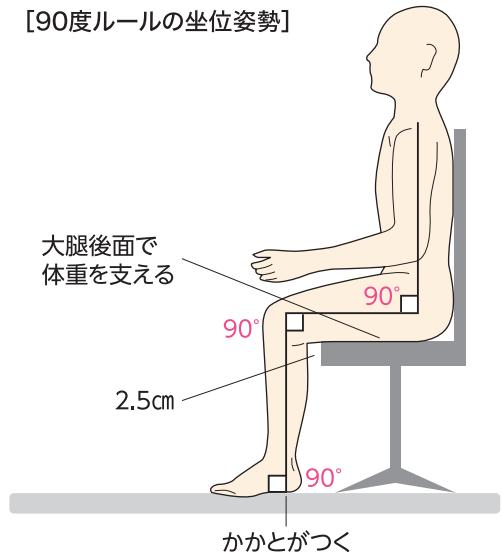

MOGU®の背すじをのばす8の字クッションは、整形医学で最も腰にやさしいとされる背骨のS字形状をサポートします。また、ひっぱって使うのびるシートクッションは、お尻の真ん中に圧力がかかりにくい構造になっており、座る接地面での体圧を分散します。

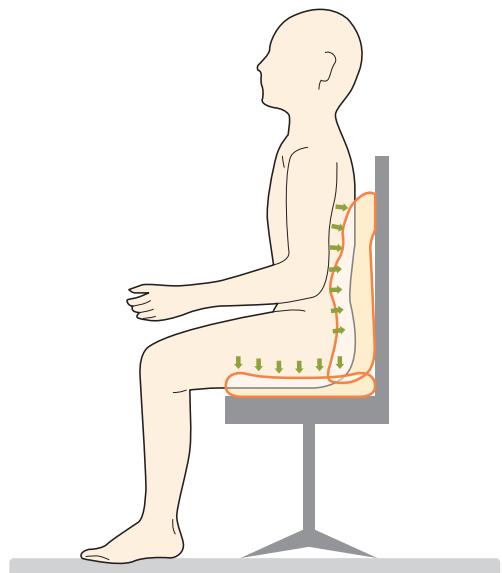

MOGU®の提案

自分で、90°ルールの坐位姿勢が保持出来ない患者さんや、尾骨部の骨突起が著しい患者さんは圧力を減らす機能や姿勢を保つ機能のあるクッションを使用する事が必要です。

⚠ 補 足

床ずれ予防用具は、その患者さんの状態に合わせて選ぶことが必要です。患者さんの症状によっては自ら訴える事ができない場合がありますので、判断に迷う際は専門知識を持った方の指導を受ける事をお奨めします。



日本は、地震による津波や異常気象による洪水が起ころる国です。MOGU®は、万が一の事態に皆さまのご家族やご自身の命を守るために、「MOGU®クッションのもつ大きな浮力により、救命浮輪としてお使いいただける」事をお知らせいたします。



MOGU®クッションは 「浮輪」のように水に浮きます！

MOGU
FEEL CONSCIOUS®

“セルフライフセービング”告知活動

「セルフライフセービング」とは


万が一の事態に備え、普段から防災・危険意識を高め、自発的にご家族やご自身の命を守ろうとすることです。

弊社は、「MOGU®パウダービーズ®クッション」の持つ大きな浮力が、津波や洪水の緊急時に救命浮輪としてお使いいただける事を、MOGU®クッションをご使用頂いているご家族の皆さんに知って頂く事が、人命を救助することにつながるのではないかと考えています。また、ご高齢のおじいちゃん・おばあちゃんやお子さまたちに、「**万一の時は、MOGU®クッションを腕に通して*から逃げなさい。浮輪になるから！**」と告知して頂き、MOGU®クッションは「浮く」という認識を持ってもらう事が重要なと考えています。

*脱落防止の為、穴の空いたクッションが有効

MOGU®が浮く理由

MOGU®パウダービーズ®は独立気泡体であり、97%は空気でできているため、ビーズ内に水がしみこまず、高い浮力を得ることができます。

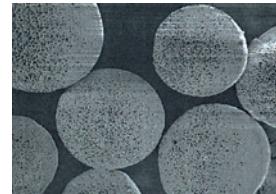

パウダービーズ®の構造




MOGU®ウエストクッション

MOGU®ホールクッション

MOGU®サークルパッド

この物理特性から、例えいろいろ便利な穴あきクッションといった穴のあいたクッションを腕に通すことで、自然災害時や水難時に浮き輪として利用も期待できます。

MOGU®穴あきクッションの浮力

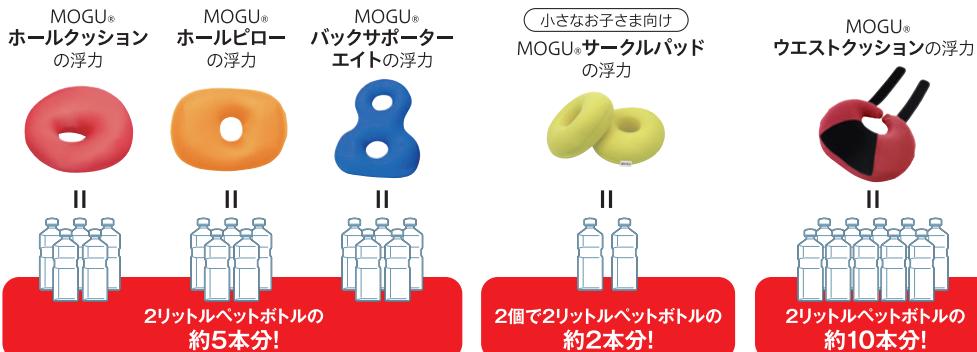

それぞれ1つあたり、2リットルのペットボトル約5本分(小さく便利な穴あきパッドの場合、2個の使用で約2本分)の浮力をもっています。人自身も水の中で浮力が働くため、お子様からお年寄りまで標準的な体型であれば、クッション一つでも十分に浮くことはできますが、**脱落防止のため腕に通して2個使われることをお薦めします。また非力な方には、2つをヒモで結ぶなど工夫も必要です。**

*海水、淡水など水の状況に影響されます。あくまでもおおよその目安であり、効果・機能を保証するものではありません。

自然災害時だけでなく、普段はクッションとしてお使いいただきながら、万が一の緊急時の備えとして、旅客船や、漁船、キャンプや釣りに活用いただいたり、地震で津波の影響が懸念される沿岸地域の介護施設・病院でお使いいただければ、一人でも多くの人命を救助することに繋がるのではないかと考えます。

*弊社製品の特性を紹介するものです。*防災用具として認定を受けている製品はありません。*「セルフライフセービング」はMOGU®の造語です。

“楽な姿勢”で家族みんなが快適生活。

車イスでの日常を
「楽な姿勢で心地よく」、
趣味や食事や仕事を
もっと楽しもう。



傾斜しても
滑り落ちない
！



いつも清潔に使える

はっ水で洗濯しやすい カバー仕様

ご家族どなたでも
ご使用できます

MOGU®
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

体勢
保持

ウエストクッション

本体(カバー付) 本体価格

8,800円

[税込9,504円(8%)]

専用カバー 本体価格

6,800円

[税込7,344円(8%)]



心地よさと機能性を持った、まったく新しいウエストクッション。

MOGU®の心地よい触感に包まれ支えられることで、
「ストレスを軽減」し「転倒の不安をなくし」、やさしく守られるような
「安心感を得られる」MOGU®ウエストクッションです。



NV
ネイビー



RE
レッド



BR
ブラウン



GY
グレー

特許
取得済
6124229-PCT

MOGU® ウエストクッション(カバー付)

〔本体〕約横55cm×縦40cm×高20cm／6cm (テープ)約幅6cm×長40.5cm]

JAN cord			
NV ネイビー	4540323019632	BR ブラウン	4540323019656
RE レッド	4540323019649	GY グレー	4540323019663

●組成 / (カバー)ポリエステル90%、ポリウレタン10% / (本体)ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ®(発泡ポリスチレン) (接着シート)クロロブレンゴム
(固定テープ部材)ナイロン、ポリエステル各100% ●重量 / 本体+カバー:約850g / 専用カバー:約670g ●日本製
※予告なく仕様を改良変更する場合がございます。

MOGU® ウエストクッション専用カバー

〔本体〕約横55cm×縦40cm×高20cm／6cm (テープ)約幅6cm×長40.5cm]

JAN cord			
NV ネイビー	4540323019670	BR ブラウン	4540323019694
RE レッド	4540323019687	GY グレー	4540323019700

MOGU® ウエストクッションが、「楽しさ」や



“超便利！”

なんでもくっつく接着シート

接着シートには、高い接着性をもつクロロブレンゴムを使用。“紙・革・木・プラスチック・金属などなんでもくっつく接着性”によって、置くだけでくっつきズレません。また、パウダービーズ®の流動性によって、使いやすい角度に調整できます。

理由その1

楽しい時間が過ごせる



トレーを置いてテーブルとして使ったり、絵を描く・書を書く・編み物をする・読書をする・食事をするなど、楽に趣味の作業が行なえます。



とっても
やわらか!
気持ち
いい!!

カバー生地には従来より柔らかで、細かな起毛をもつプレミアム生地を使用しています。生地の柔らかさとパウダービーズ®の流動性によってより使用者にフィットします。


よりやわらかでソフトな
プレミアム生地

パウダービーズ®とプレミアム生地によって、ストレスを抑える触感とお腹周りを包み込む安心感を得ることができます。


理由その3

気持ちよさから安心感が得られる

MOGU®を抱かずに10分間座った状態

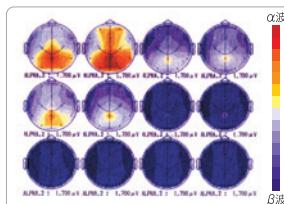

MOGU®を抱いて10分間座った状態

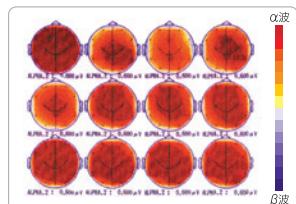

MOGU®に触ることによって、人の脳はリラックス状態を示すα波が多く出すことがわかっています。このα波が出ているとき、ストレスは沈まり、体の免疫が高まることがわかっています。

MOGU® ウエストクッションの使い方や場所はさまざま。くつろ



PC作業のアームレストとして
タブレット操作でのスタンドとして
好きな角度に向けて行えます




トレーを置いて、絵を描いたり書を書く、手芸を行う、食事をするなど
テーブルとしてお使いいただけます

▲「接着シート」の製品素材についてのご注意 接着シートにはゴム素材「クロロブレンゴム」を使用しております。ゴムアレルギー体質の方はご使用を控えてください。また、アレルギー燃焼した場合、一酸化炭素等の有害ガスが発生する危険性があります。保管、使用する場所及びその付近では火気厳禁です。●破れ：接着シートに銛利なものが当たった場合、破れ、

「やさしさ」をもたらす“4つの快適理由”

理由その2

楽な姿勢が取れる

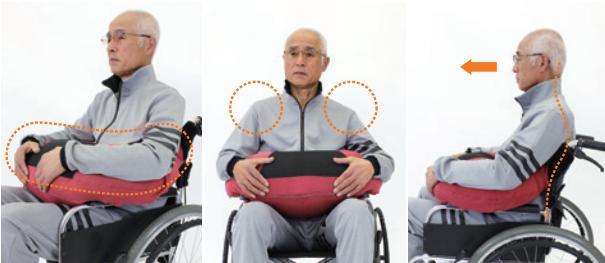

柔らかく厚みのあるクッションで肘を支え、腕の重みを吸収する

肩がリラックスすることで背中の筋肉の負担を和らげる

自然と背すじがのび
顔が前を向いた理想的な姿勢を取りやすくなる

腕のポジションを安定させることによって、前かがみになることを防ぎ、背中の負担を和らげます。長時間座り姿勢で過ごされる方、特に前かがみになりやすい方・肩が疲れやすい方におすすめです。



長時間座ることで上体が前かがみになり、首や背中・腰に負担がかかり、より無理な姿勢を誘発することが考えられます。MOGU®ウエストクッションは、両腕を支えることで上体を起こし、楽な正しい姿勢をとることができます。

理由その4

体とウエストクッションを密着できる



サポートテープはズレやひっぱりに強い素材を使用しており、クッションの脱落や前面への転倒の不安を和らげます。

※ご本人の意思に沿った、自立支援を促進する目的での使用を想定しています。ご自分で着脱や意思表示ができない場合、サポートテープの使用は控えてください。



体とウエストクッションを密着させるサポートテープ

MOGU®ウエストクッションにはサポートテープが付いています。一人で装着する場合は、車イスの手すりに巻きつけることでクッションと体を簡単に密着・取り外しが可能で、使わない時は、テープを先端から折りたたみ、根元で止めることによってスッキリと収めることができます。

ぎの時間は、ネックピローや背当てクッションとしても使えます。



車など移動時のPCクッションとして



車イスでの読書クッションとして長時間でも楽に行えます



背もたれクッションとして



うつぶせ寝でのバストクッションとして



ソファを使ってネックピローとして

体質ではない方でも使用時に、不快感や肌に異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。●火気：火気に近づけないでください。製品が溶ける、燃えることがあります。裂けの原因となりますので、取り扱いに注意をしてください。●色移：接着シートは色移行を起こすことがあります。長時間素材を触れたまま保管しないようにしてください。

柔らかく
ムレにくい
メッシュ生地を
使用!



型崩れしない!「立体成形シート」

「立つ」「座る」を繰り返しても
同じフィット感を安定して得られます

MOGU®
FEEL CONSCIOUS

＼瞬間／ スワッテ 美姿勢フィット

本体価格 7,800円 [税込8,424円(8%)]

体圧分散
体勢保持

特許
申請中

座って瞬間フィット、S字姿勢をサポートします

パウダービーズ®の流動性により体格差をカバーし、座後部のふくらみが骨盤を持ち上げることで、背骨のS字カーブをサポートします

2018年 初頭
発売予定



赤



紺



茶



グレー

MOGU® スワッテ 瞬間美姿勢フィット [約横40cm×縦41cm×高(低部)9cm・(高部)12.5cm]

JANコード	赤	4540323000500	紺	4540323000517	茶	4540323000524	グレー	4540323000531
--------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	-----	---------------

●組成 / 表地:エスセル系ウレタン(ポリエスセル100%) / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 約600g ●中国製


座るだけで、S字姿勢を “サポート&キープ”

お尻が支えられることで骨盤が持ち上がる所以、背筋が自然に伸びてS字姿勢がキープされます




荷重分散

背骨が緩やかなS字カーブを描くことで、重みを分散し、腰への負担を和らげます

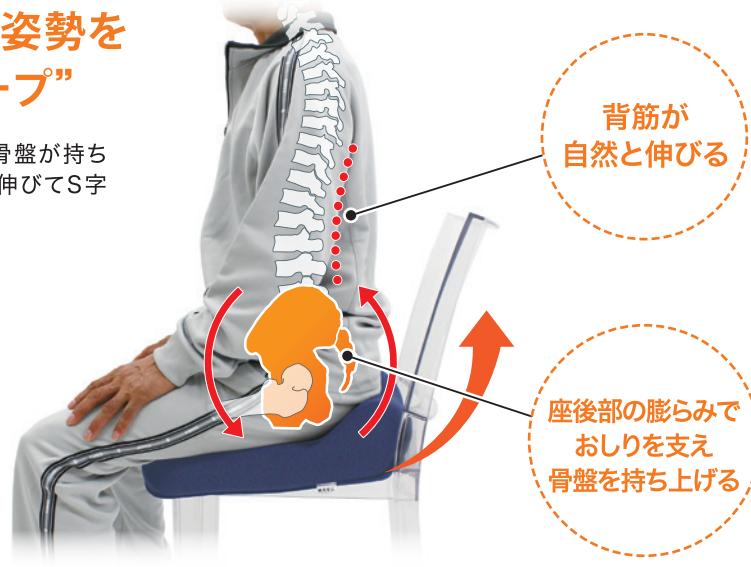

座って“瞬間フィット”

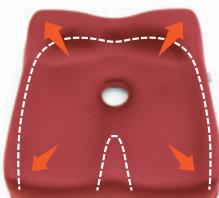

座るとパウダービーズ®が後部とサイドに流動します




パウダービーズ®が隙間を埋めるため、
体格差をカバーし、高いフィット感を得られます



後部に集まつたパウダービーズ®
が骨盤を持ち上げます

「楽な姿勢」をサポートする “カタチ”

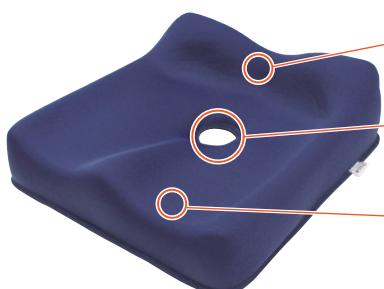

後部に高さをつけることで、
お尻を支持します

このへこみによって、お尻の
中央部の圧迫を防ぎます

座面のU字形の凹部が、
お尻から両太ももにかけて
フィット！



座った際のズレを防ぐ
「すべり止め付き」



椅子で



ソファで



車椅子で



**楽な姿勢で
集中力UP!**

背中や腰の負担が軽減されることで集中力が
アップ！長時間デスクワークをされる方や、
受験を控え勉強に励むお子様にオススメです



カバー付きで
弾力と耐久性が
2倍!



MOGU
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

体勢
保持

尾骨を浮かすシートクッション

本体(カバー付) 本体価格

3,800円

[税込4,104円(8%)]

替カバー 本体価格

1,800円

[税込1,944円(8%)]

専用すべりにくいカバー 本体価格

2,300円

[税込2,484円(8%)]

“座ること”が、寝たきりにならない元気になるための第一と考えます。

長くベッドなどで座っている・寝ていると、どうしてもおしりが痛くなるものです。
座る時に、尾骨を完全に浮かしたいというお客様の声から生まれたクッションです。

赤

緑

青

茶

※「尾骨を浮かすシートクッション専用すべりにくいカバー」の色は、「緑・青・茶」のみです。

MOGU®

尾骨を浮かすシートクッション(カバー付)

[約横36cm×縦39cm×高12cm]

JAN cord	赤	4540323015801	緑	4540323015818	青	4540323015825	茶	4540323015832

MOGU®

尾骨を浮かすシートクッション替カバー

[約横36cm×縦39cm]

JAN cord	赤	4540323015849	緑	4540323015856	青	4540323015863	茶	4540323015870

MOGU®

尾骨を浮かすシートクッション専用すべりにくいカバー

[約横36cm×縦39cm]

JAN cord	緑	4540323018970	青	4540323018987	茶	4540323018994


●組成 / (カバー)ナイロン85%、ポリウレタン15% / (本体)ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) / (すべりにくいカバー)ポリエステル90%、ポリウレタン10% ●重量 / 本体+カバー:約530g / 替カバー:約60g ●カバー手洗い ●日本製

床ずれが起きやすい
仙骨部を浮かす形状で
体圧をかけず負担を和らげる。



尾骨を完全に浮かす

切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。

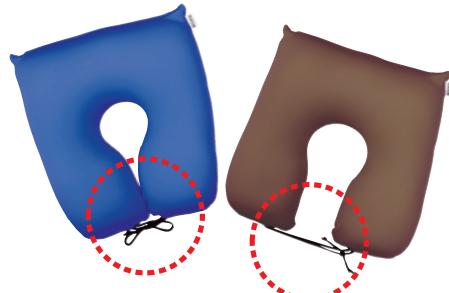

左右を引っ張り
紐で穴の大きさを調節することができます



専用カバーの色は本体と同色です。

前後で厚みを調整できる

ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。

後に倒れる方

後ろ側に移動させたとき



前に倒れる方

前面に移動させたとき



ほかにも
こんな使い方が
できます



“うつぶせ時のまくら”として
「パワーダービーズ_®」の流動性」と
「フィットカーブ設計」で
うつぶせ時の顔をやさしく支えます



“背当てクッション”として
背当てクッションとしてもお使い
いただけます



“首まくら”として
しっかりとした弾力で、首を支えるまくら
としてもお使いいただけます



いろいろ
選べる

10
カラー



専用カバーの色は本体と同色です。

カバー付きで
弾力と耐久性が
2倍!



*「ひっぱって使うのびるシートクッション専用すべりにくいカバー」の色は、「オレンジ・緑・青・茶」のみです。

MOGU
FEEL CONSCIOUS®

体圧
分散

体勢
保持

ひっぱって使うのびるシートクッション

一般名：シートクッション ※一般的な用途は、左記の「一般名」で検索ください。

本体(カバー付) 本体価格

2,400円

[税込2,592円(8%)]

専用カバー 本体価格

1,400円

[税込1,512円(8%)]

専用すべりにくいカバー 本体価格

2,000円

[税込2,160円(8%)]

座った時、左右のクッションを引っ張ることで
おしりの真ん中に圧力がかかりにくい構造になっています。

MOGU®

ひっぱって使うのびるシートクッション(カバー付)
[約横38cm×縦38cm×高(底部)5cm・高部10cm]

JAN cord	赤	4540323017249	ピンク	4540323017256
オレンジ	4540323017263	黄	4540323017270	
緑	4540323017287	水色	4540323017294	
青	4540323017300	紺	4540323017317	
茶	4540323017324	黒	4540323017331	

MOGU®

ひっぱって使うのびるシートクッション替カバー
[約横38cm×縦38cm]

JAN cord	赤	4540323017348	ピンク	4540323017355
オレンジ	4540323017362	黄	4540323017379	
緑	4540323017386	水色	4540323017393	
青	4540323017409	紺	4540323017416	
茶	4540323017423	黒	4540323017430	


MOGU®

ひっぱって使うのびるシートクッション専用
すべりにくいカバー [約横38cm×縦38cm]

JAN cord	オレンジ	4540323019007	緑	4540323019014
青	4540323019021	茶	4540323019038	

●組成 / (カバー)ナイロン85%、ポリウレタン15% / (本体)ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) / (すべりにくいカバー)ポリエチル90%、ポリウレタン10% ●重量 / 本体+カバー:約400g / 専用カバー:約80g ●カバー手洗い ●日本製

のびる・ひきしめる・フィットする・あたたかい このフィット感がやさしくこっちいい!!

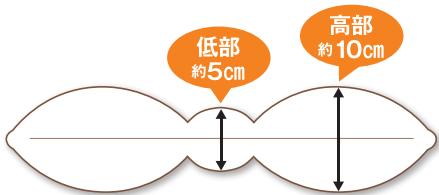

〈横から見たクッション断面図〉




MOGU®ひっぱって使うのびるシートクッションは伸縮しますので、左右に引っ張るとパウダービーズ®の優れた流動性によりバランスを調整しお尻にぴったりとフィットします。



パウダービーズ®特有の保温効果により、
お尻がじんわりと暖かくなっていますので、冷え性の方にもオススメです!



紐が付いているので
“背当てクッション”として
引っ掛けで使いやすい!

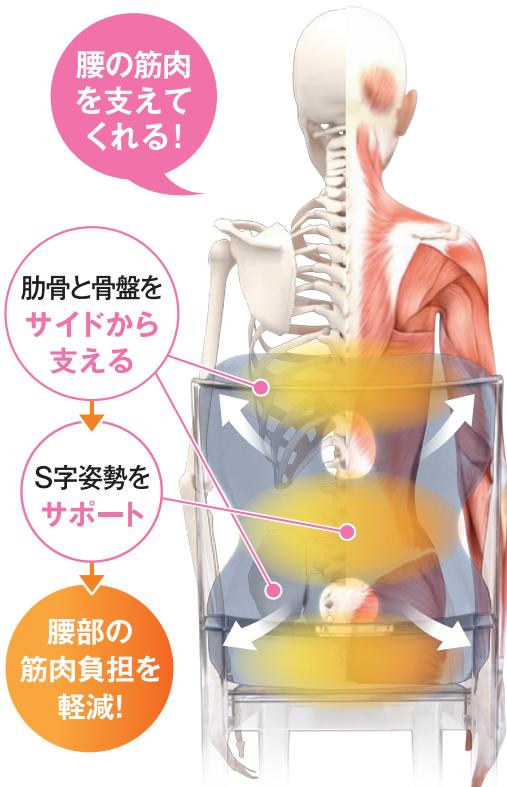

【三段階サポートシステム】

MOGU
FEEL CONSCIOUS

体圧分散

体勢保持

姿勢体幹サポーターエイト

本体価格 **3,800円** [税込4,104円(8%)]

もたれるだけで正しいS字姿勢をサポート!

左右のふくらみが肋骨と骨盤を支えることで、体が歪みにくく
腰椎をまっすぐに整え、腰部の筋肉の負担を軽減します

2017年11月
発売予定




MOGU® 姿勢体幹サポーターエイト [約横38cm×縦45cm×高12cm]

JAN cord									
赤	4540323000388	紺	4540323000395	茶	4540323000401	グレー	4540323000418		

●組成 / 表地:ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 約600g ●日本製

背中・腰の負担を和らげる“「エイト」のわけ”

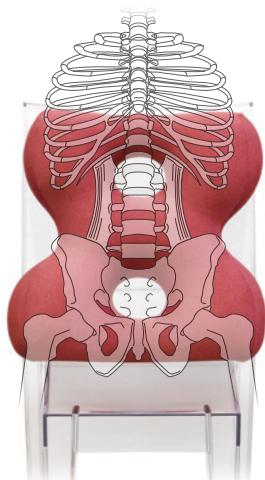

① 肋骨と骨盤を支え、もたれるだけで腰部をまっすぐに整えます

左右のふくらみが、サイドからホールドします。骨盤と肋骨を支えると、体が歪みにくくなり、腰椎をまっすぐに整えます




2つの穴で、自分の体型に合った高さに調節できます



② 背骨のS字形状にフィットし、「座る」をより楽にします

真ん中のふくらみが、背骨のS字形状にフィット! 腰への荷重が分散されることで、筋肉への疲労を和らげます

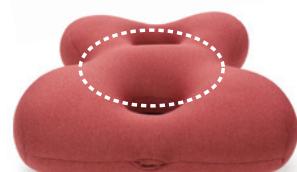

背中・腰の負担を和らげたい方

長時間ドライブされる方

長時間デスクワークされる方

長時間座っても疲れにくい!

姿勢が整うことで、腰や背中への負担が和らぎ長時間楽に座ることができます



座りやすいフォルム

底面にカーブをつけることで座るスペースを確保し、サイドに移動したビーズが腰からヒップにかけてホールドします



「3Confort」生地を使用

「やわらかな触感」、「体を包み込む弾力」、「空調の落ち着いた風合い」が心地いいプレミアムな生地を使用しています



MOGU[®]
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

姿勢
支持

背すじをのばす8の字クッション

一般名：バックサポーターイイト ※ 一般的の用途は、左記の「一般名」で検索ください。

本体価格 2,800円 [税込3,024円(8%)]



“姿勢の悪さは万病のもと”と言われています。
整形医学で最も腰にやさしいとされる
背骨のS字形状をサポートすることで
健康維持として役立ててください。
車イス・椅子などにお使いいただけます。

MOGU[®] 背すじをのばす8の字クッション [約横35cm×縦45cm]

赤

オレンジ

緑

青

茶

黒


JAN cord

赤	4540323017508	オレンジ	4540323017515	緑	4540323017522
青	4540323017539	茶	4540323017546	黒	4540323017553

●組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 約400g ●日本製

正しい姿勢を意識して、健康な毎日を目指しましょう。

2つのリングが3段階のボリュームを作り出し、パウダービーズ®の流動性によって、ヒップ・腰・背中を支えます。

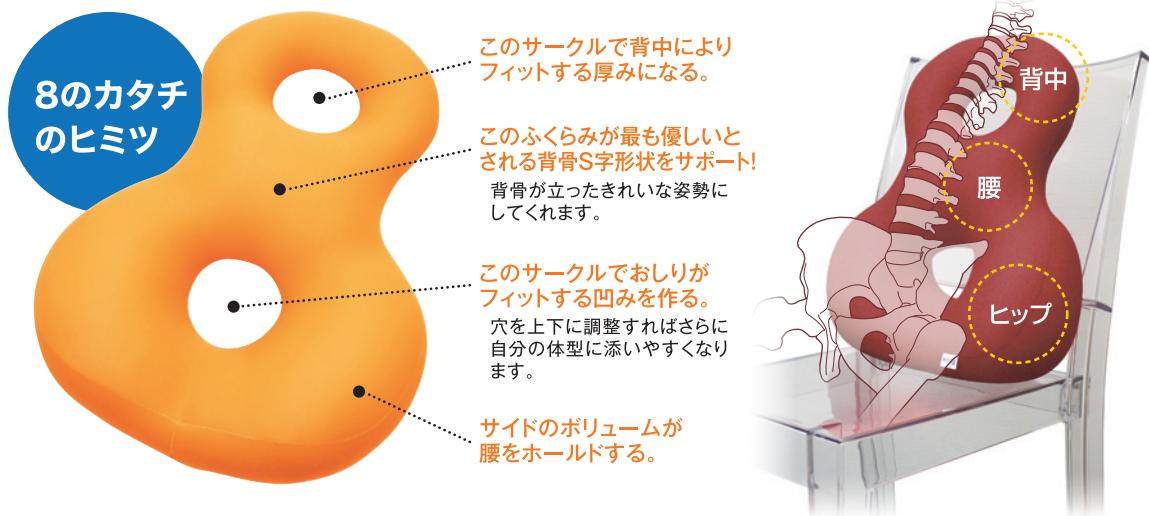


逆向きでご使用ください

深く座り、背すじをのばす8の字クッションと背中を密着させると、車イスでは背もたれのない肩甲骨周辺まで広く支えることができます。



2つの穴で高さの微調整も可能

伸縮性生地と流動性の高いパウダービーズ®により、2つのホール位置を調節できるため、自分に合ったポジションに調節できます。

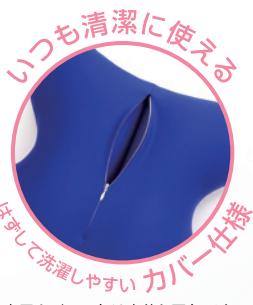

カバー付きで
弾力と耐久性が
2倍!

専用カバーの色は本体と同色です。



MOGU
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

姿勢
支持

腰を楽にするクッション

一般名：バタフライクッション ※一般的の用途は、左記の「一般名」で検索ください。

本体(カバー付) 本体価格 **2,800円** [税込3,024円(8%)] 替カバー 本体価格 **1,000円** [税込1,080円(8%)]

専用すべりにくいカバー 本体価格 **2,000円** [税込2,160円(8%)]

左右のクッションが、腰を覆うようにサポートしてくれるので
腰への負担を和らげてくれます。

赤 オレンジ 緑 青 茶 黒

※「腰を楽にするクッション専用すべりにくいカバー」の色は、「オレンジ・緑・青・茶」のみです。

MOGU®
腰を楽にするクッション(カバー付)

[約横40cm×縦33cm×高12cm]

JAN card	赤	4540323017560	オレンジ	4540323017577
緑	4540323017584	青	4540323017591	
茶	4540323018635	黒	4540323017607	

MOGU®
腰を楽にするクッション替カバー

[約横40cm×縦33cm]

JAN card	赤	4540323017614	オレンジ	4540323017621
緑	4540323017638	青	4540323017645	
茶	4540323018642	黒	4540323017652	

MOGU®
腰を楽にするクッション専用すべりにくいカバー

[約横40cm×縦33cm]

JAN card	オレンジ	4540323018925	緑	4540323018932
青	4540323018949	茶	4540323018956	


●組成 / (カバー)ナイロン85%、ポリウレタン15% / (本体)ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) / (すべりにくいカバー)ポリエステル90%、ポリウレタン10% ●重量 / 本体+カバー:約410g / 替カバー:約70g ●カバー手洗い ●日本製

MOGU®腰を楽にするクッションのひっぱって使う理由



座る際に、左右のクッションを引っ張りながら腰に当てれば、パウダービーズ®が左右に流動し、伸縮性の生地の戻る力で隙間を埋め、自分の体型に合うように調節することができるのでよりフィット感が増します。

MOGU®腰を楽にするクッションの 気持ちいい理由

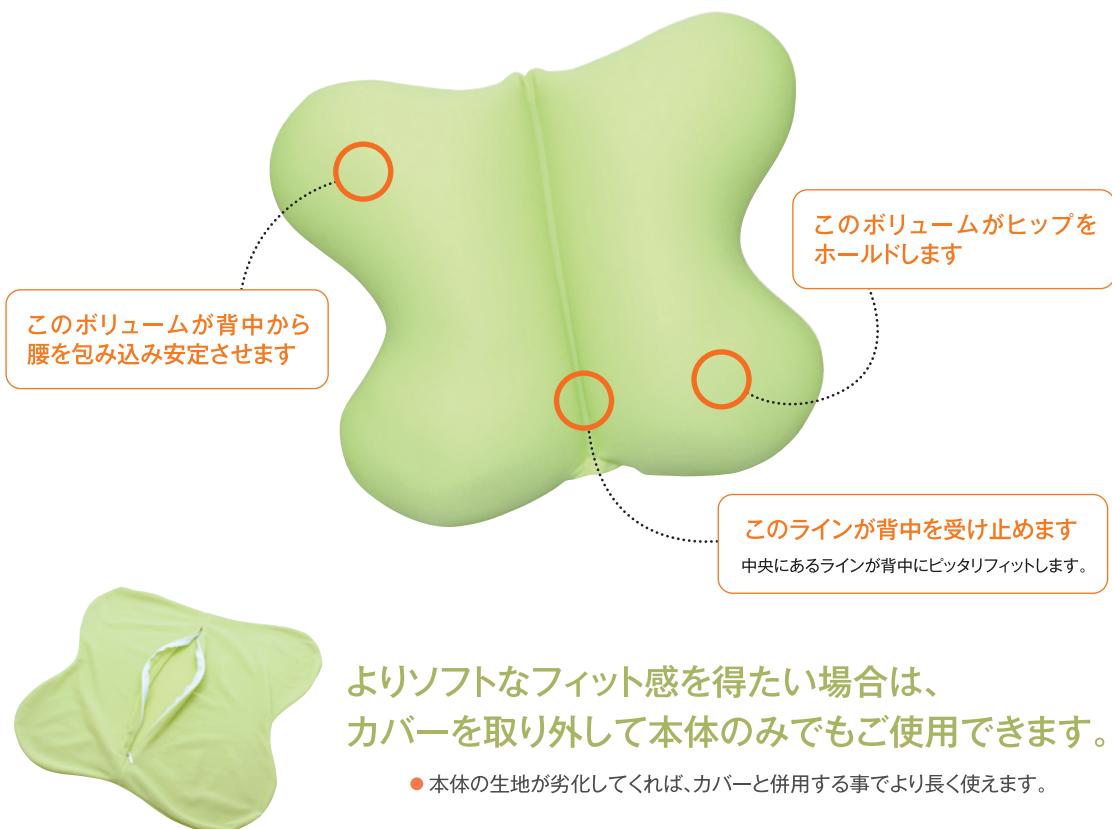

よりソフトなフィット感を得たい場合は、カバーを取り外して本体のみでもご使用できます。

- 本体の生地が劣化してくれれば、カバーと併用する事でより長く使えます。



MOGU[®]
FEEL CONSCIOUS

体勢
保持

ネックピロー

本体価格 1,900円 [税込2,052円(8%)]

首全体を楽に支えるネックピローです。
ハイバック仕様などの車イスを利用される方へ
首周り全体を負担をかけることなく支えることができます。



MOGU[®] ネックピロー [約横27cm×縦28cm]

JAN cord	赤	4540323020409	薄茶	4540323020416	茶	4540323020423	黒	4540323020430
----------	---	---------------	----	---------------	---	---------------	---	---------------

●組成／表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%／中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 約175g ●日本製

首全体を楽に支える秘密は「五角形△」。




首が触れる面を従来の丸形から五角形にする事で首まわりを 360°ホールドし、首全体を中心地よく安定させます。また、ネックピローの先端にはスナップボタンが付いており、着脱が簡単にできます。

ボタンが大きく付けやすい
ワンタッチ装着「スナップボタン」



首の前倒れを防ぐ新設計！

従来のネックピローは首が前に倒れやすかったため、前側を高く設計しました。これにより、首の力を抜いてもしっかりと支えてくれるため、前倒れを防ぐ事ができます。

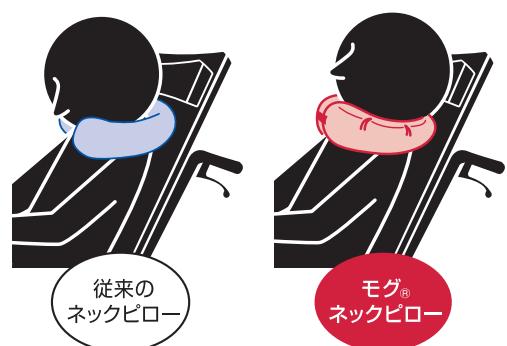



細菌・ウィルス
アレル物質を
吸着・分解!

プレミアムカバー付

いつも清潔に使える
はじめて洗濯しやすいカバー仕様

MOGU
FEEL CONSCIOUS

プレミアム家族の健康まくら

本体(カバー付) 本体価格 **6,000円** [税込6,480円(8%)] | 替カバー 本体価格 **2,500円** [税込2,700円(8%)]

「家族の健康」はみんなの願い...

カゼ・アレルギー対策に... 首・肩のリラックスに...

ウィルスや細菌・花粉などを吸着して分解!

フィットカーブが首や肩の筋肉を支え
脱力リラックス!!

寝てる家族をやさしく守る!



WH
ホワイト



NV
ネイビー



RE
レッド



BR
ブラウン



GY
グレー

MOGU® プレミアム家族の健康まくら 本体(カバー付)

[約横60cm×縦40cm×高8cm]

JAN cord	WH ホワイト	NV ネイビー	RE レッド	BR ブラウン	GY グレー
WH ホワイト	4540323020935	NV ネイビー	4540323020997		
RE レッド	4540323020980	BR ブラウン	4540323021000		
GY グレー	4540323021017				

MOGU® プレミアム家族の健康まくら 替カバー

[約横60cm×縦40cm]

JAN cord	WH ホワイト	NV ネイビー	4540323021048
WH ホワイト	4540323021024	NV ネイビー	4540323021048
RE レッド	4540323021031	BR ブラウン	4540323021055

●組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% 芯:ウレタン100% / 中材:パウダーピーズ®(発泡ポリスチレン) 付属カバー(バイエルニット):綿66%、ポリエステル32%、ポリウレタン2% クリーンコーティング(アースプラス™) ●重量 / 本体+カバー:約950g / 専用カバー:約150g ●日本製

「MOGU® プレミアム家族の健康まくら」の “睡眠サポート”のポイントは4つ!

1

家族の健康

細菌、ウィルス、花粉、ダニの死骸やフンなどのアレル物質を吸着・分解する「プレミアムカバー」付!

2

パウダービーズ®の心地よさ

赤ちゃんの柔肌をおもい出させるリラックス効果!

3

家族が選べる

高さと硬さ
6パターンフィット!

4

首から肩にかけて沿いやすい

フィットカーブ設計!

① カバーの機能性

家族の健康 細菌、ウィルス、花粉、ダニの死骸やフンなどのアレル物質を吸着・分解する「プレミアムカバー」



プレミアム家族の健康まくらのカバーには、クリーンコーティング(アースプラス™加工)を施しました。菌やウィルスだけでなくダニの死骸やフン、花粉、などのアレル物質まで吸着・分解し無害にします。ニオイの原因菌も分解するため、コーティングがないカバーに比べキレイな状態を保つことができます。



タンパク質由来のニオイ(体臭・汗臭)を分解するから枕に残るニオイを軽減!


花粉、ダニの死骸、フンなどのアレル物質を分解するから安心が続く!

菌・ウィルス分解のクリーンコーティング(アースプラス™加工)とは

earthplus™

<特許番号: 5995100号 >

特殊コーティング(アースプラス™)は、ハイドロキシアパタイトと銀、酸化チタンの複合材料です。この複合材料は細菌ウイルスや菌由来のニオイの原因菌である蛋白質を吸着分解する特許技術です。その効果は医学系英文誌でも発表され、国際的に高い評価を受けています。

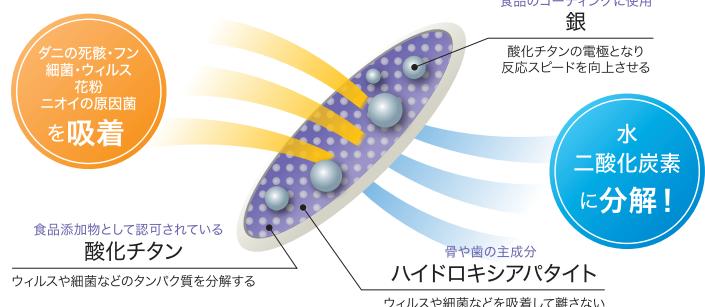

具体的な効果

- ① 細菌・ウィルス・花粉等のアレル物質を捕まえて離さずに分解する。
- ② 体臭・汗臭・排泄臭等に由来する原因菌を捕まえて離さずに分解する。
- ③ 厚生労働省に認可された食品添加物を組み合わせているため、安心です。
- ④ 水に溶け出さないため、効果が持続します。

*記載の効果を100%保証するものではありません。※繰り返しの洗濯によって、コーティングの効果は徐々に低下します。※アースプラス™は株式会社信州セラミックスの特許です(特許 5995100号) ※アースプラス™は、薬剤のように即効性はありません。衛生環境の質を向上させ、環境に負荷をかけることなく、継続的な効果を発揮します。※さらに詳しい情報、医学医療的な評価等は「earth-plus.jp」に記載されています。

⚠ カバーのみ洗濯可。(本体は洗濯できません。)

寝る

② ビーズの機能性

パウダービーズ®の心地よさ 「赤ちゃんの柔肌をおもい出させるリラックス効果」

MOGU®クッションを抱きしめた時の、「触感」や「懐かしさ」「暖かさ」は赤ちゃんの柔肌をおもい出させます。その効果は人の心に安堵感を与え、よりリラックスした精神状態へと誘います。




特殊コーティングビーズを採用
クッション用ビーズよりも耐久性の高いビーズを使用しました。
(当社比2倍)


当社製クッション用ビーズよりも、流動性に優れ、細かく圧縮強度が高いビーズを使用しました。

③ 構造の機能性


家族が選べる 「高さと硬さ 6 パターンフィット」

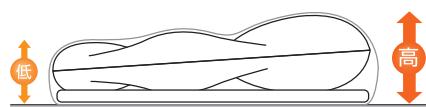

前後でビーズ量が変化するため、高さが変わります。

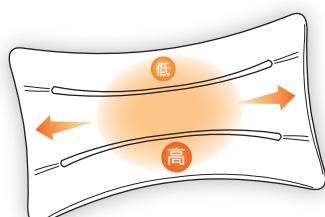


頭を置くと中央部のビーズはサイドに移動しやすい抑え形状になっており、後頭部を受け止めフィットします。

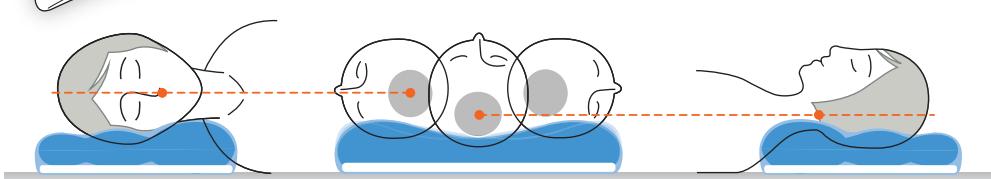


寝返りの際に、肩幅の高さによって首が落ち込むのを抑え、首への負担を和らげます。

より高くしたいとき

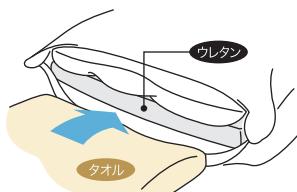


より低くしたいとき

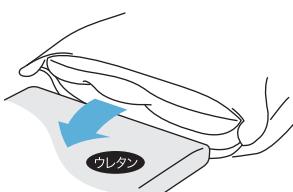

さらに高くしたい時は、ウレタンシートに加えてタオル等を重ねる、逆に低くしたい時は、ウレタンシートを取り外すことで、高さ調節が可能です。

ウレタンシートを下にした時

パウダービーズ®の感触が
気持ちいい柔らかい枕になります。

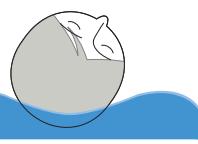


ウレタンシートを上にした時

ウレタンシートの感触を感じるやや硬めの枕。
同時にやや高めになります。

ウレタンシート面を上下に使い分ける事により、枕の感触の硬め、柔らかめを選ぶ事ができます。

まくらの「高さ」と「硬さ」の組み合わせが6パターン!
あなたに合った、ジャストフィットのパターンをお選びください。


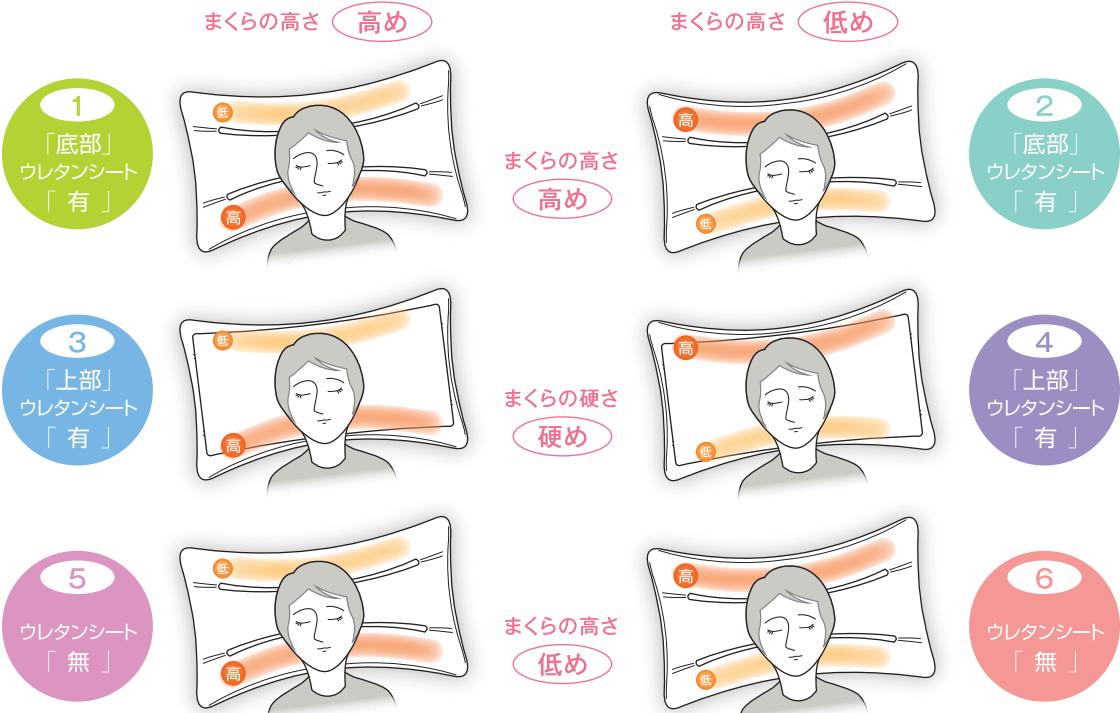


④ 形状の機能性

首から肩にかけて沿いやすい「フィットカーブ設計」
寝返りしても余裕のサイズ横60cm×縦40cm

※プレミアム家族の健康まくらのみ

まくら本体の寝返りラインとパウダービーズ®の流動性によって、中央が低くサイドが高いフィットカーブができ、仰向け・横向き寝の両方に対応します。横幅は60cmと寝返りしても余裕のあるサイズで、首から肩にかけてまくらが沿いやすいよう外形にもフィットカーブ設計を施しています。

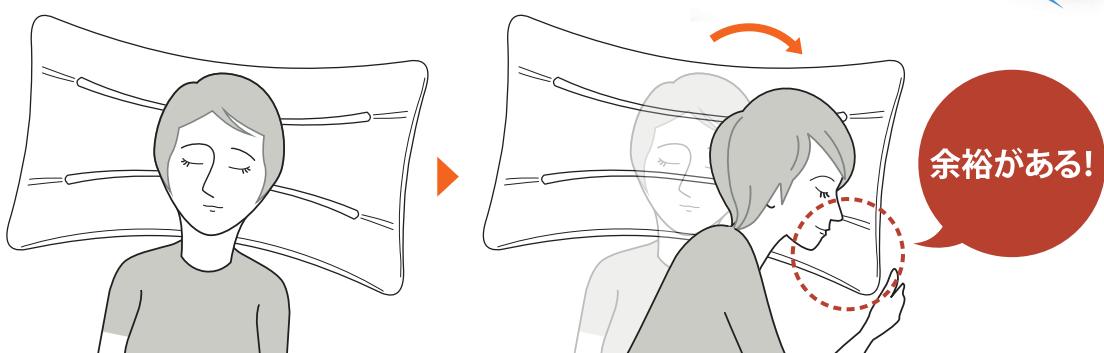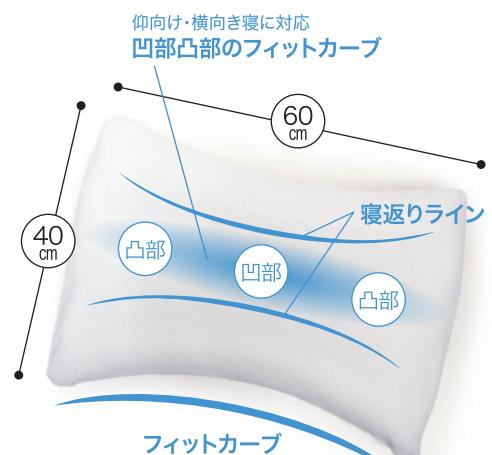

寝る

細菌・ウィルス
アレル物質を
吸着・分解!

プレミアムカバー付

1 家族の健康

細菌、ウィルス、花粉、ダニの死骸やゴミなどのアレル物質を吸着・分解する
プレミアムカバー付!

2 パウダービーズ[®]の
心地よさ

赤ちゃんの柔肌をおもい出させる
リラックス効果!

**4つの
“家族の健康”
機能!**

3 家族が選べる
高さと硬さ
6パターンフィット!

4
仰向け・横向き寝に対応
寝返りラインと凹部凸部の
フィットカーブ設計!

MOGU
FEEL CONSCIOUS

家族の健康まくら

本体(カバー付) 本体価格

4,800円

[税込5,184円(8%)]

替カバー 本体価格

2,200円

[税込2,376円(8%)]

「家族の健康」はみんなの願い...

カゼ・アレルギー対策に...

ウィルスや細菌・花粉などを吸着して分解!

首・肩のリラックスに...

フィットカーブが首や肩の筋肉を支え
脱力リラックス!!

寝てる家族をやさしく守る!



WH
ホワイト



NV
ネイビー



RE
レッド



BR
ブラウン



GY
グレー

MOGU[®] 家族の健康まくら 本体(カバー付)

[約横54cm×縦38cm×高7cm]

JAN cord		WH ホワイト	NV ネイビー	RE レッド	BR ブラウン	GY グレー
WH ホワイト	4540323020881	NV ネイビー	4540323020904			
RE レッド	4540323020898	BR ブラウン	4540323020911			
GY グレー	4540323020928					

MOGU[®] 家族の健康まくら 替カバー

[約横54cm×縦38cm]

JAN cord		WH ホワイト	NV ネイビー	RE レッド	BR ブラウン	GY グレー
WH ホワイト	4540323021079	NV ネイビー	4540323021093			
RE レッド	4540323021086	BR ブラウン	4540323021109			
GY グレー	4540323021116					

●組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% 芯:ウレタン100% / 中材:パウダービーズ[®](発泡ポリスチレン) 付属カバー(パイルニット):綿66%、ポリエステル32%、ポリウレタン2% クリーンコーティング(アースプラスTM) ●重量 / 本体+カバー:約900g / 専用カバー:約150g ●日本製

「MOGU® 家族の健康まくら」の “睡眠サポート”のポイントは4つ!

① カバーの機能性

家族の健康

細菌、ウィルス、花粉、ダニの死骸やフンなどのアレル物質を吸着・分解する「プレミアムカバー」



家族の健康まくらのカバーには、クリーンコーティング(アースプラス™加工)を施しました。菌やウィルスだけでなくダニの死骸やフン、花粉、などのアレル物質まで吸着・分解し無害にします。ニオイの原因菌も分解するため、コーティングがないカバーに比べキレイな状態を保つことができます。



細菌やウィルスを
吸着・分解するから
キレイが続く!

タンパク質由来の
ニオイ(体臭・汗臭)を分解するから
枕に残るニオイを軽減!


花粉、ダニの死骸、
フンなどのアレル物質を
分解するから
安心が続く!

菌・ウィルス分解のクリーンコーティング(アースプラス™加工)とは

earthplus™

<特許番号: 5995100号>

特殊コーティング(アースプラス™)は、ハイドロキシアパタイトと銀、酸化チタンの複合材料です。この複合材料は細菌ウイルスや菌由来のニオイの原因菌である蛋白質を吸着分解する特許技術です。その効果は医学系英文誌でも発表され、国際的に高い評価を受けています。

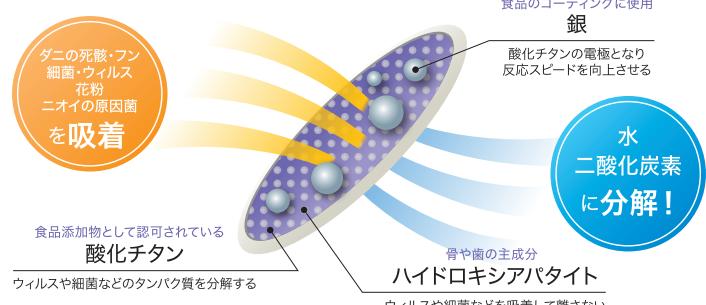

具体的な 効果

- ① 細菌・ウィルス・花粉等のアレル物質を捕まえて離さずに分解する。
- ② 体臭・汗臭・排泄臭等に由来する原因菌を捕まえて離さずに分解する。
- ③ 厚生労働省に認可された食品添加物を組み合わせているため、安心です。
- ④ 水に溶け出さないため、効果が持続します。

※記載の効果を100%保証するものではありません。※繰り返しの洗濯によって、コーティングの効果は徐々に低下します。※アースプラス™は株式会社信州セラミックスの特許です(特許 5995100号) ※アースプラス™は、薬剤のように即効性はありません。衛生環境の質を向上させ、環境に負荷をかけることなく、継続的な効果を発揮します。※さらに詳しい情報、医学医療的な評価等は「earth-plus.jp」に記載されています。

⚠ カバーのみ洗濯可。(本体は洗濯できません。)

寝る

② ビーズの機能性

パウダービーズ[®]の心地よさ 赤ちゃんの柔肌をおもい出させる「リラックス効果」



特殊コーティングビーズを採用


クッション用ビーズよりも耐久性の高いビーズを使用しました。

MOGU[®]クッションを抱きしめた時の、「触感」や「懐かしさ」「暖かさ」は赤ちゃんの柔肌をおもい出させます。その効果は人の心に安堵感を与え、よりリラックスした精神状態へと誘います。当社製クッション用ビーズよりも、流動性に優れ、細かく圧縮強度が高いビーズを使用しました。(当社比2倍)

③ 構造の機能性

家族が選べる 「高さと硬さ6パターンフィット」

家族の健康まくらは、前後でビーズ量が変化するため、高さが変わります。頭を置くと中央部のビーズはサイドに移動しやすい押え形状になっており、後頭部を受け止めフィットします。寝返りの際に、肩幅の高さによって首が落ち込むのを抑え、首への負担を和らげます。

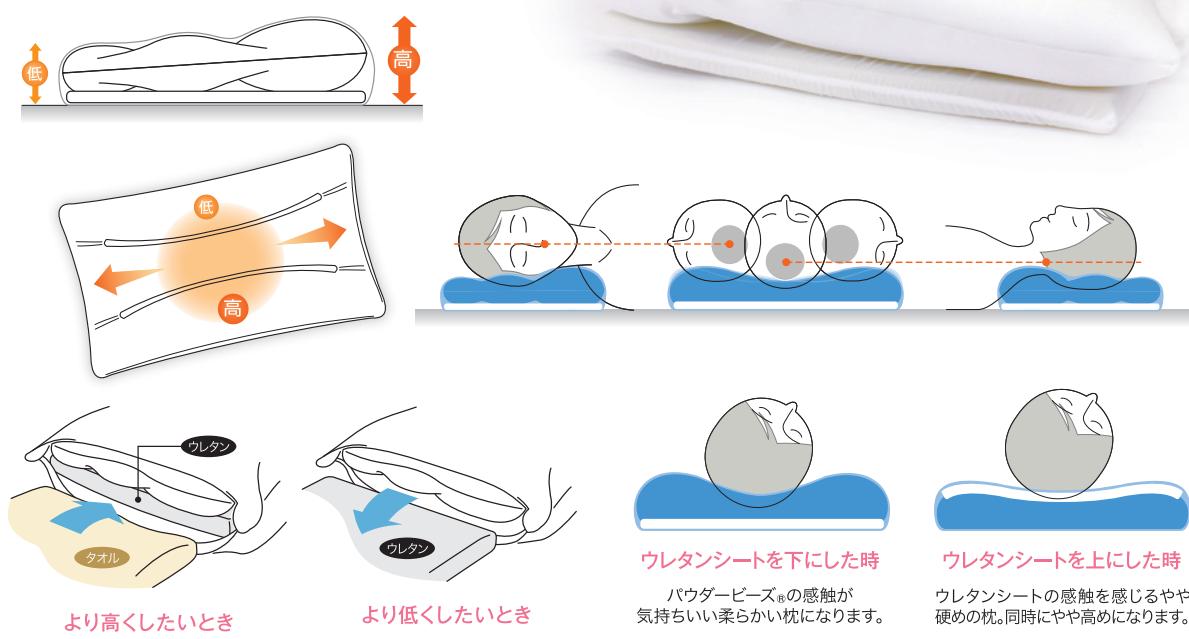


さらに高くしたい時は、ウレタンシートに加えてタオル等を重ねる、逆に低くしたい時は、ウレタンシートを取り外すことで、高さ調節が可能です。

パウダービーズ[®]の感触が

気持ちいい柔らかい枕になります。

ウレタンシート面を上下に使い分ける事により、枕の感触の硬め、柔らかめを選ぶ事ができます。

まくらの「高さ」と「硬さ」の組み合わせが6パターン! あなたに合った、ジャストフィットのパターンをお選びください

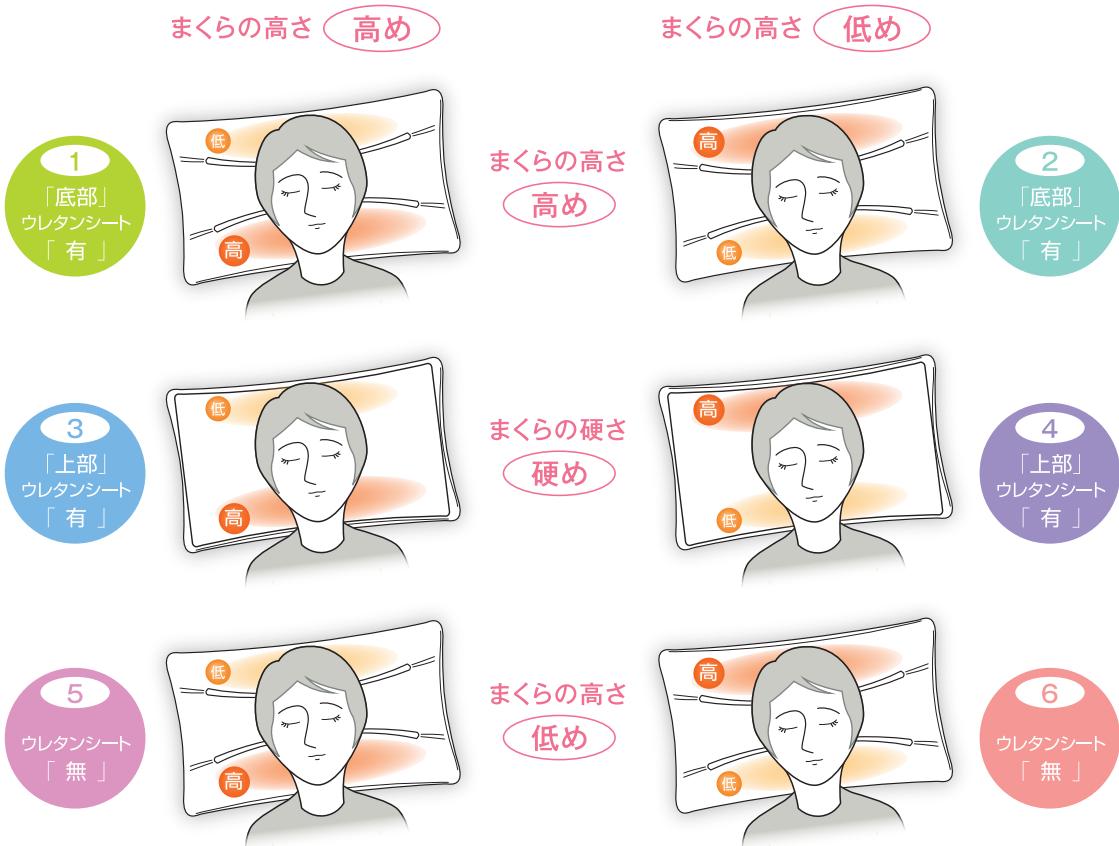

④ 形状の機能性

仰向け・横向き寝に対応
寝返りラインと凹部凸部の「フィットカーブ設計」



本体の寝返りラインとパウダービーズ®の流動性によって、中央が低くサイドが高いフィットカーブができ、首から頭にぴったりフィットします。

「家族の健康」はみんなの願い…

2つの“家族の健康まくら”で、寝てる家族をやさしく守ります



MOGU
FEEL CONSCIOUS

☆☆
プレミアム
家族の健康まくら

ニオイを軽減!

タンパク質由来の
ニオイ(体臭・汗臭)を
分解。

キレイが続く!

細菌やウィルスを
吸着・分解。

安心が続く!

花粉、ダニの死骸・
フンなどのアレル物質を
分解。

細菌・ウィルス
アレル物質を 吸着・分解!
プレミアムカバー付


「プレミアム家族の健康まくら」・「家族の健康まくら」の各カバー共通

MOGU
FEEL CONSCIOUS

家族の健康まくら

「MOGU® 家族の健康まくら」製品比較

MOGU®
☆**プレミアム**☆
家族の健康まくら

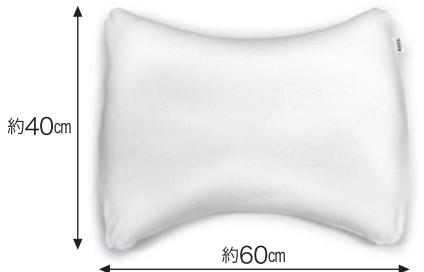

サイズ



特長

プレミアムなフィットカーブ設計

- ① 凹部凸部の寝返りライン
- ② 首から肩にかけて沿いやすい湾曲した外形
- ③ 寝返りしても余裕のある40×60cmサイズ

ポイント!!

フィットカーブ設計

凹部凸部の寝返りライン

細菌、ウィルス、花粉、ダニの死骸やフンなどのアレル物質を吸着・分解する「プレミアムパイルニットカバー」


赤ちゃんの柔肌をおもい出させるリラックス効果「パウダービーズ®」

家族が選べる高さと硬さ「6パターンフィット」

中材
形狀



カラー

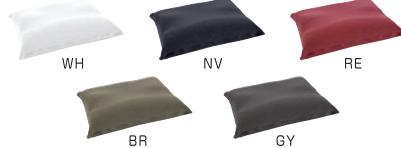

価格

本体(カバー付) 本体価格

6,000円

[税込6,480円(8%)]

本体(カバー付) 本体価格

4,800円

[税込5,184円(8%)]

替カバー 本体価格

2,500円

[税込2,700円(8%)]

替カバー 本体価格

2,200円

[税込2,376円(8%)]

寝る



MOGU
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

体勢
保持

気持ちいい抱きまくら

本体(カバー付) 本体価格

6,800円

[税込7,344円(8%)]

替カバー 本体価格

2,400円

[税込2,592円(8%)]



今までにない、つるつるとした肌触りが
とても気持ちいい抱きまくらです。

カバーには、スポーツウェアにも使用されている
吸水速乾性に優れた繊維を使用しています。



MOGU® 気持ちいい抱きまくら(カバー付)

[約幅50cm×長115cm×高20cm]

JAN cord	赤	4540323018338	ピンク	4540323018345	オレンジ	4540323018352
緑	4540323018369	青	4540323018376	紺	4540323018383	
深緑	4540323018390	茶	4540323018406	黒	4540323018413	
グレー	4540323018420					

MOGU® 気持ちいい抱きまくら替カバー

[約幅50cm×長115cm]

JAN cord	赤	4540323018437	ピンク	4540323018444	オレンジ	4540323018451
緑	4540323018468	青	4540323018475	紺	4540323018482	
深緑	4540323018499	茶	4540323018505	黒	4540323018512	
グレー	4540323018529					

●組成 / (カバー)ナイロン85%、ポリウレタン15% (本体)ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) ●重量 / 本体+カバー:約1,550g / 替カバー:約110g
●日本製

このフォルムが どんな寝姿勢にも、かしこくフィット!

この独特的のフォルムが、どんな寝姿勢にもフィットし、横向き寝やうつぶせ寝の手足のポジションを安定させます。また、抱きしめることで体圧が分散され、身体への負担を軽減してくれます。



寝る



横向き

抱きまくらを体に添うように抱え、フックの部分を足で挟むことで肘、ひざ、足首の圧が分散されます。



横向き
(枕つき)

頭をフック部のボリュームに乗せることで、枕と抱きまくらの両方の役割になります。



うつぶせ

パワーダービーズ[®]の体圧分散性・流動性によって、通常のクッションに比べ息苦しさやしづれが緩和されます。



丸くなる

丸まった寝姿勢でも、抱きまくらがとても柔らかく流動性が高いため、抱え込んだ寝姿勢に沿ってフィットします。



体位変換が容易でない方にも

側臥位、腹臥位などの体位でも使用いただけます。体位によっては肩や肘・ひざ、腰などに他のクッションを併用し、骨突出部の体圧を分散してください。また、寝たきりの方は最低2時間ごとの体位変換をおこなってください。



MOGU
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

体勢
保持

体圧分散に優れた四角いクッション

本体 本体価格 **1,800円** [税込1,944円(8%)]

専用カバー 本体価格 **1,600円** [税込1,728円(8%)]

専用すべりにくいカバー 本体価格 **2,000円** [税込2,160円(8%)]

パウダービーズ[®]の流動性により体圧分散性に優れた、シンプルな形状のクッション。
支える、挟む、抱える、座る…、36cm×36cmの使いやすい大きさです。

赤 オレンジ 緑 青 茶 黒

※「体圧分散に優れた四角いクッション専用すべりにくいカバー」の色は、「オレンジ・緑・青・茶」のみです。

MOGU[®]

体圧分散に優れた四角いクッション(本体)
[約横36cm×縦36cm×高12cm]

JAN cord	赤	4540323018208	オレンジ	4540323018215
緑	4540323018222	青	4540323018239	
茶	4540323018246	黒	4540323018253	

MOGU[®]

体圧分散に優れた四角いクッション専用カバー
[約横36cm×縦36cm]

JAN cord	赤	4540323018260	オレンジ	4540323018277
緑	4540323018284	青	4540323018291	
茶	4540323018307	黒	4540323020539	

MOGU[®]

体圧分散に優れた四角いクッション専用
すべりにくいカバー [約横36cm×縦36cm]

JAN cord	オレンジ	4540323019120	緑	4540323019137
青	4540323019144	茶	4540323019151	
黒				

●組成 / 表地: ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材: パウダービーズ[®](発泡ポリスチレン) / カバー: ナイロン85%、ポリウレタン15% / すべりにくいカバー: ポリエステル90%、ポリウレタン10% ●重量 / 本体: 約445g / 専用カバー: 約50g ●日本製

座位で、仰臥位で、側臥位で…、 単体でも補助としても使える

寝る



トレーの下に体圧分散に優れた四角いクッションを
敷くことで、食事にも便利。

※上記は「MOGU®すべりにくいカバー」を使用しています。

体の各骨突出部に挟んで差し込むことで
床ずれ防止に役立ちます。

「まくらの高さ補助」として



「背当てクッション」として



体位変換等で引っ張る際は使用する人の肌の状態に注意してください。場合によっては褥瘡などの症状を
悪化させることができます。また、強く引っ張ると破れてビーズが漏れる原因になります。



MOGU
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

体勢
保持

ポジショニングに便利な筒型クッション

本体 本体価格 **1,600円** [税込1,728円(8%)]

専用カバー 本体価格 **1,400円** [税込1,512円(8%)]

専用すべりにくいカバー 本体価格 **2,000円** [税込2,160円(8%)]

頭や腰・ひじ・ひざなど、部位の体圧を分散するのに使い勝手のよい筒型のクッションです。



*「ポジショニングに便利な筒型クッション専用すべりにくいカバー」の色は、「オレンジ・緑・青・茶」のみです。

MOGU®
ポジショニングに便利な筒型クッション(本体)

[約幅15cm×長38cm]

MOGU®
ポジショニングに便利な筒型クッション専用カバー

[約幅15cm×長38cm]

MOGU®
ポジショニングに便利な筒型クッション専用
すべりにくいカバー

[約幅15cm×長38cm]

JAN cord	赤	4540323017997	オレンジ	4540323018000
緑	4540323018017	青	4540323018024	
茶	4540323018031	黒	4540323018048	

JAN cord	赤	4540323018055	オレンジ	4540323018062
緑	4540323018079	青	4540323018086	
茶	4540323018093	黒	4540323020522	

JAN cord	オレンジ	4540323019045	緑	4540323019052
青	4540323019069	茶	4540323019076	

●組成 /表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% /中材:パウダービーズ_®(発泡ポリスチレン) /カバー:ナイロン85%、ポリウレタン15% /すべりにくいカバー:ポリエチル90%、ポリウレタン10% ●重量 /本体:約320g /専用カバー:約40g ●日本製

差し込む、あてがうなど
使いやすい形状のクッション、
MOGU®パウダービーズ®が体圧を
やさしく分散します。

一つでも、組み合わせでも

寝る

側臥位
での
使用例



仰臥位
での
使用例



ポジショニングに便利な筒型クッションの専用カバー(別売)を使えば、耐久性もアップしお洗濯に便利です。



体位変換等で引っ張る際は使用する人の肌の状態に注意してください。場合によっては褥瘡などの症状を悪化させることができます。また、強く引っ張ると破れてビーズが漏れる原因になります。



MOGU
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

体勢
保持

体位
変換

体位変換に使いやすい筒型クッションロング

本体 本体価格 **4,500円** [税込4,860円(8%)]

専用カバー 本体価格 **3,000円** [税込3,240円(8%)]

専用すべりにくいカバー 本体価格 **4,000円** [税込4,320円(8%)]

長い筒形でパウダービーズ[®]が、上半身から下半身まで広く体圧を分散します。

体位変換にも役立つクッションでカバーを使えば、耐久性もアップします。



*「体位変換に使いやすい筒型クッションロング専用すべりにくいカバー」の色は、「オレンジ・緑・青・茶」のみです。

MOGU[®]

体位変換に使いやすい筒型クッションロング(本体)
[約幅18cm×長88cm]

JAN cord	赤	オレンジ	緑	青	茶
赤	4540323018109	オレンジ	4540323018116		
緑	4540323018123	青	4540323018130		
茶	4540323018147				

MOGU[®]

体位変換に使いやすい筒型クッションロング専用カバー
[約幅18cm×長88cm]

JAN cord	赤	オレンジ	緑	青	茶
赤	4540323018154	オレンジ	4540323018161		
緑	4540323018178	青	4540323018185		
茶	4540323018192				

MOGU[®]

体位変換に使いやすい筒型クッションロング専用
すべりにくいカバー [約幅18cm×長88cm]

JAN cord	オレンジ	緑	青	茶
オレンジ	4540323019083	緑	4540323019090	
青	4540323019106	茶	4540323019113	

●組成 / 表地: ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材: パウダービーズ[®] (発泡ポリスチレン) / カバー: ナイロン85%、ポリウレタン15% / すべりにくいカバー: ポリエステル90%、ポリウレタン10% ●重量 / 本体: 約1,080g / 専用カバー: 約110g ●日本製

体位変換に使いやすい筒型クッションロングで様々な体位をサポートします。

側臥位から腹臥位への「体位変換」



体位変換に使いやすい筒型クッションロングの厚みを変えながら、姿勢を少しずつ移動させていくことで、側臥位から腹臥位への体位変換が可能です。

※骨突出部には、他のクッションと併用する必要があります。

体位変換に使いやすい筒型クッションロングを真ん中から半分に折り、山の形にして頭から肩、腕にかけて挟み込むことで、上半身を起こした時の支えとして使用できます。



褥瘡予防のための体位変換スケジュール

⚠ 2時間を目安に、体位変換をする必要があります。体位変換スケジュール表を掲示し、原則として2時間に1回、一定の骨突出部上の圧を完全に取り除く必要があります。

⚠ 体位変換等で引っ張る際は使用する人の肌の状態に注意してください。場合によっては褥瘡などの症状を悪化させることがあります。



体位変換スケジュール表例



赤

ピンク

オレンジ

黄

緑

水色

青

紺

茶

黒

MOGU
FEEL CONSCIOUS®

体圧
分散体勢
保持

体にフィットする穴あき枕

一般名：ホールピロー ※一般的の用途は、左記の「一般名」で検索ください。

本体価格

1,900円

[税込2,052円(8%)]



まくらや体位変換クッションとしても
お使いいただけます。
やさしい曲線が背中、腰、おしりに
フィットしやすいクッションです。

MOGU® 体にフィットする穴あき枕 [約横35cm×縦28cm×高14cm]

JAN cord

赤	4540323018536	ピンク	4540323018543	オレンジ	4540323018550	黄	4540323018567	緑	4540323018574
水色	4540323018581	青	4540323018598	紺	4540323018604	茶	4540323018611	黒	4540323018628

●組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 約340g ●日本製

体形に合わせて、 パウダービーズ®がフィットする



サイド部が腰や背中をしっかりとホールドし、身体が横に倒れるのを防ぎます。



もっとも床ずれを起こしにくいとされる90°ルールの坐位姿勢を補助します。

※左記の写真は「体にフィットする穴あき枕」と「尾骨を浮かすシートクッション」を併用したものです。



背当てクッション以外に
まくらとしても使用できます。


うつぶせ
まくら
として



腕を突っ込む



穴に顔をうずめる

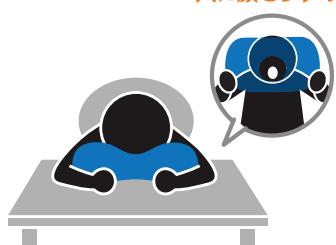

机などで仮眠する際、MOGU®体にフィットする穴あき枕の穴に片腕を入れると、仮眠まくらとして便利です。頭の位置を高くしたい時は、体にフィットする穴あき枕を縦に、横にすれば低くなり、お好きな高さでご使用いただけます。

MOGU®体にフィットする穴あき枕の穴に顔をうずめると、空気の通気口が確保されるため、うつぶせ寝の際の息苦しさが解消されます。また、サイドのボリュームが、優しく頭を支えます。



MOGU
FEEL CONSCIOUS®

体圧
分散

体勢
保持

いろいろ便利な穴あきクッション

一般名：ホールクッション ※一般的の用途は、左記の「一般名」で検索ください。

本体価格 **2,200円** [税込2,376円(8%)]



クッション

腰とイスとの間を埋めて
背筋ピンッ!



背当てクッション (その1)

高い方を上にして使えば
イスとの隙間を埋め、
猫背になりにくく!



背当てクッション (その2)

高い方を下にして使えば
イスと腰の隙間を埋めて
楽チン、リラックスモード♪



2つ重ねて背もたれ

ソファでのリラックスタイム♪

MOGU® いろいろ便利な穴あきクッション

[約36φcm×高(低部)7cm・(高部)15cm]

赤

オレンジ

緑

青

茶

黒

JAN cord

赤	4540323017669	オレンジ	4540323017676	緑	4540323017683
青	4540323017690	茶	4540323017706	黒	4540323017713

●組成／表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%／中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) ●重量 約390g ●日本製

ベッドでも車イスでも、ちょうどいい大きさとフォルム。

穴が空いているのがいい！ 体圧分散効果


いろいろ便利な穴あきクッションの穴には、座った時にかかる重さを分散させる効果があります。また伸縮性の高いスパンデックス生地と流動性に優れたパウダービーズ[®]との相乗効果で、より優しく、よりしっかりとフィットします。

厚みの違いがいい！ ありそうでなかつた8°傾斜

前方は低く、後方が高いいろいろ便利な穴あきクッションは約8°の傾斜があるため、身体に差し込みやすい形状です。また、もたれかかってもしっかりと体勢を支えられる張りがあり、ベッドで車イスで様々な使い方に対応できます。

身体への差し込みで30°傾斜が容易にできる

身体に差し込みするだけで、体圧を広面積で受け止める理想の30°傾斜が容易にできます。また、パウダービーズ[®]の流動性により、8°～30°の広範囲に調整ができます。

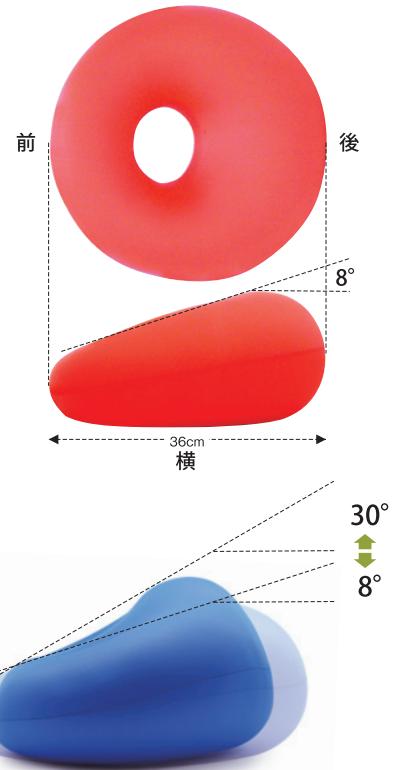



体圧
分散

体勢
保持

MOGU
FEEL CONSCIOUS

小さく便利な穴あきパッド

一般名：サークルパッド ※一般的の用途は、左記の「一般名」で検索ください。

本体価格 **2,200円** [税込2,376円(8%)]

ふっくら厚みのある小さめの穴あきクッションです。
腕・足・ひじ・ひざのまくらとして、お使いいただけます。



MOGU® 小さく便利な穴あきパッド [約22.5φcm・2個]

JAN code	赤	オレンジ	緑	青	茶	黒
	4540323020348	4540323020355	4540323020362			
	4540323020379	4540323020386	4540323020393			

●組成／表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%／中材:パウダービーズ_®(発泡ポリスチレン) ●重量 約100g(×2) ●中国製

サポータークッションとして、遊具として…、手軽に使える小型のクッション。



腕・足・肘・膝などの
褥瘡予防

手・足などの
リハビリ遊具

真ん中に穴の空いたシンプルなカタチなので、
体圧を分散させたいところへのサポーターや
リハビリでの遊具としてなど、さまざまな用途で
お使いいただけます。

もたれる・支える・受け止める



22.5cmの手軽に
使いやすい大きさ。
小さくても、パウ
ダービーズ[®]がしつ
かりと入っている
ので、底付きが起
こりにくい！



かかとなどの床ずれ防止に

厚みがあるため、底付きしにくく

安心してお使いいただけます。

また、足首に通すことで完全にかかとを浮かせます。



肘や膝、手先などの支持に

22.5cmのコンパクトサイズで、

支持したいあらゆる部分でご活用できます。

2つ1セットですので、両方使いや重点使いもできます。



MOGU
FEEL CONSCIOUS®

体圧
分散

体勢
保持

すきまをうめる多用途クッション

一般名：トライパッド ※一般的の用途は、左記の「一般名」で検索ください。

本体価格 **1,900円** [税込2,052円(8%)]



すきまに差し込む多用途なクッションです。
腕・足・ひじ・ひざのまくらにも
お使いいただけます。

MOGU® すきまをうめる多用途クッション [約横32cm×縦32cm×高13cm]

JAN cord

赤	4540323017447	オレンジ	4540323017454	緑	4540323017461
青	4540323017478	茶	4540323017485	黒	4540323017492

●組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) ●重量 約220g ●日本製

小型のクッションで
いろんなところに差し込め
使いやすいクッションです。



2つ使用して車椅子での 体勢保持に

車椅子と身体の隙間を埋め、しっかりとホールド。
左右から身体を支え、身体の横倒れを防ぎます。



かかとの床ずれ防止に

すきまをうめる多用途クッションがかかとを広く包み、
体圧が分散されます。



肘や膝、手先の支持にも

32cmのコンパクトサイズで、
支持したいあらゆる場所で活用できます。

いつも清潔に使える
ぱぱして洗濯しやすい カバー仕様

頭・肩・ヒジ
3点支持で
快適姿勢



MOGU
FEEL CONSCIOUS

体圧
分散

体勢
保持

頭と上半身を支えるクッション

一般名：トライパッドボディ ※一般的な用途は、左記の「一般名」で検索ください。

本体(カバー付) 本体価格

7,900円

[税込8,532円(8%)]

替カバー 本体価格

2,900円

[税込3,132円(8%)]



頭と上半身を支える大きめクッション。
カバー仕様で弾力があり、
しっかりと支えてくれます。

赤

オレンジ

緑

青

茶

黒

MOGU® 頭と上半身を支えるクッション(カバー付)

[約横55cm×縦55cm×奥行き22cm]

JAN cord	赤	4540323020447	オレンジ	4540323020454	緑	4540323020478
青	4540323020461	茶	4540323020485	黒	4540323020492	

MOGU® 頭と上半身を支えるクッション 専用カバー

[約横55cm×縦55cm]

JAN cord	赤	4540323017782	オレンジ	4540323017799	緑	4540323017805
青	4540323020508	茶	4540323017836	黒	4540323020515	

●組成／(カバー)ナイロン85%、ポリウレタン15% (本体)ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 / 本体+カバー:約1,220g / 専用カバー:約90g
●日本製

ベッドや座椅子等で リラックスしたい時や食事をとる時に 体勢保持と姿勢支持に最適なクッションです。

食事
のとき


背当て
クッション
として



頭と上半身を支えるクッション
と腰を近づけて座ると、背当て
クッションとして使用できます。


上体を起こす事が
難しい方には…

座椅子などを併用して頸部
前屈位にしていただくことで
誤嚥をしにくくなります。

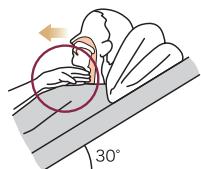

● 頸部前屈位とは？

上半身を30度起こした仰臥位
を取った状態で視線が前方を
向くように枕を調節し、下あご
と頸部の間に指3本程度入る
角度の姿勢です。この時気管の
方が食道よりも上になるため、
食塊が気管に入りにくく誤嚥し
にくいといわれています。

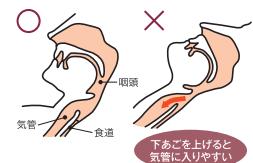

参考文献：なぜそうする？根拠を知つてわかる介護技術（誠文堂新光社）

リラックス
したい
とき

上体支持
クッション
として

背中をもたれ掛け
させると、頭、背中、
ヒジの3か所を支持
し、快適な姿勢をと
ることができます。



頭全体を支えるた
め、首に力を入れ
る必要がありません。

クッションの曲面が
背中を受け止め、
体圧を分散させます。

程よい高さでヒジ
を支えるため、肩
がリラックスでき
ます。



専用カバーの色は本体と同色です。

MOGU
FEEL CONSCIOUS

活動
補助

脳の活性

癒しの触感クッション

本体(カバー付・1個) 本体価格

1,900円

[税込2,052円(8%)]

替カバー(1個) 本体価格

1,000円

[税込1,080円(8%)]



パウダービーズ[®]の流動性と
伸縮性で手にフィット。
脳梗塞などによる
手指の拘縮症状の方の介護に。

赤

緑

青

MOGU[®] 癒しの触感クッション(カバー付・1個)

[約横15cm×縦9cm×奥行6cm]

JAN code

赤 4540323015979 緑 4540323015986 青 4540323015993

MOGU[®] 癒しの触感クッション替カバー(1個)

[約横15cm×縦9cm]

JAN code

赤 4540323016419 緑 4540323016426 青 4540323016433

●組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 / 本体+カバー:約20g / 替カバー:約5g ●日本製

伸縮性と反発力が握る動作を促します。 洗濯して、くりかえし使えるカバー付き。



本製品はカバー付きですので、こまめにカバーを洗濯し清潔に保ってください。
なお、中身（中材）の洗濯後は十分に脱水を行ってください。


洗濯方法については、P.89をご参考ください

反発力のあるクッションを握ると…

「クッションの反発力」が「握り返す動作」につながり、
脳に刺激が伝わると同時に、関節の動きが広がると言われています。

脳梗塞や認知症などの後遺症で手を握りしめたままになった人に、高い反発力を持つクッションでできたグリップを約一ヶ月握らせたところ、指がほぐれ、発語するなどの症状の改善が見られたという報告があります。*

* 2013年 日本神経科学会など

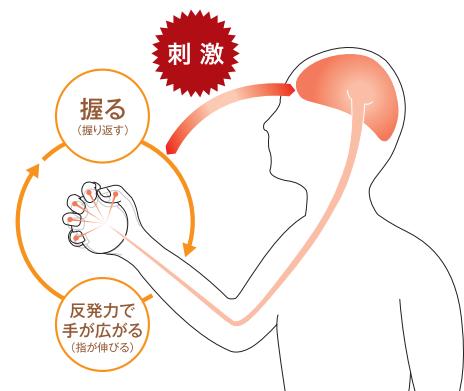

使い方は簡単！

- ① 人差し指と小指に紐を通す
- ② そのまま握る




介護者が介助する基本の指の開き方

手首を曲げた状態を保ったまま、ゆっくりと指を開きます。洗う場合は、そのまま下から手を入れて開いた手を洗ってあげてください。

⚠ 拘縮により、手を握りしめたままになった人の手を急に開くのは危険が伴います。可能であれば、作業療法士等の専門家に診てもらい、指導を受ける事が安全です。

パウダービーズ[®]の流動性で
さまざまな握り方ができる

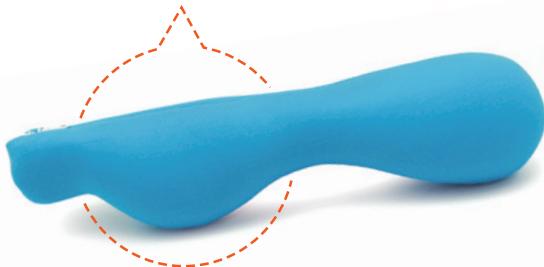

MOGU[®]
FEEL CONSCIOUS

活動
補助

力を入れずに、書ける・持てる!

筆記具&食事用グリップ

本体価格 1,400円 [税込1,512円(8%)]

PAT.5456933

鉛筆・絵筆
ボールペン
などにも
使える



握力が弱い方でも、力を入れずに
筆記具やスプーン・フォークを持つことができます。
筆談や絵を描いたりと
リハビリにもお使いいただけます。

MOGU[®] 筆記具&食事用グリップ [約横4.5cm×縦14cm×高5cm]

赤 ピンク 黄 緑 水色 紺 黒

JAN cord		赤	ピンク	黄	緑	水色	紺	黒
赤	4540323017843	ピンク	4540323017850	黄	4540323017867	緑	4540323017874	
水色	4540323017881			4540323017898	黒	4540323017904		

●組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ[®](発泡ポリスチレン) ●重量 約15g ●中国製

指を曲げにくい方や力を入れにくい方に… さまざまな握りができるユニバーサルデザイン。

パウダービーズ®と伸縮性生地によって構成されたMOGU®筆記具&食事用グリップは、指への圧力を最小限に抑え、自然と握りやすい形状へ変化します。

これにより、指とグリップが広い面積で触れ合うため、強く握らなくても持ち続けられます。



フィット性を調節できます

前の膨らみの大きさを変えることで、グリップ感を自由に調節できます



差し込んで、装着。握りが軽くなります

いつも使っているスプーンやフォークをMOGU®筆記具&食事用グリップに差し込むことで、接触面積が広がり軽く握れるようになります。また、スプーンだけでなく、筆記具にも使用できます。



① カトラリーを差し込む

② 先端部のビーズを移動させて
チャックを閉める

※先端部にビーズが多いと、閉めにくい原因になります。



年を重ねても、
いつまでも元気で
いたいですよね。



セルフメディケーション(自発的健康管理)のススメ

みなさんの中で毎日の健康管理の習慣・健康維持のためにジョギング、ウォーキング、散歩などの運動に努められている方も多くいらっしゃるのではないかでしょうか。しかし、そういう方でも寒い日は外に出るのが少々億劫な時もありますよね？そこで、保温性の高いMOGU®ウォーマーシリーズを使って、外でもベッドでも暖かく過ごしてみてはいかがでしょうか？

「セルフメディケーション」とは

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とWHO世界保健機関は定義しています。つまり、日々健康に過ごすために、自分の心身の健康を自分で守るという意味です。

セルフメディケーション、ヘルスケアの構成要因と可能性





MOGU[®] の 保温性




保温力が違う! 新素材エアーパウダービーズ[®]

エアーパウダービーズ[®]の97%は空気で、内部は微細な独立気泡になっています。その気密性の高さと質量の含有量は、他の素材と比べて非常に多いと言われています。そのため、保温効果が高く、身体の温かさを逃しません。さらには空気のように軽い新素材が商品の軽量化をより高めました。




エアーパウダービーズ[®]

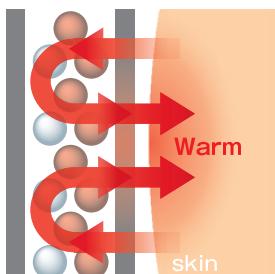

保温力が違う

新素材エアーパウダービーズの97%は空気で、内部は微細な独立気泡になつており、人体の熱を逃しません。保温による血流促進によって筋力のパフォーマンスをアップさせます。

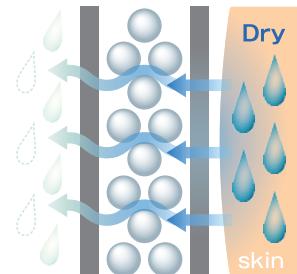


通気性が良い

吸湿性に優れた生地より吸い上げられた湿気は、エアーパウダービーズの粒間を通り、外気に発散されます。

付け心地が違う! 肌にやさしい 高機能スパンデックス生地を使用。

インナーとしても使用され肌に優しいスパンデックス生地は、高い伸縮性と優れた吸湿速乾性によって、これまでにはない、気持ちいい触感が特徴です。また、エアーパウダービーズ[®]の流動性と高伸縮生地によって、フィット感が高まり、あらゆる動きがスムーズに行えます。

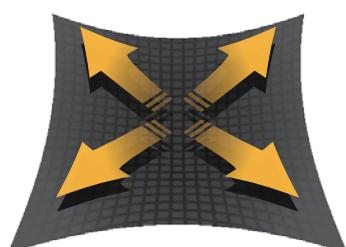

高伸縮生地「スパンデックス」

薄手で肌触りのいいストレッチ生地は伸縮性が高く、あらゆる体形にフィットします。

保温性

首を温めると
血流効果によって
体も温かく
なります。

ベッドで
使用いただくと
首もとがいつも
あたたかい。

MOGU[®]
FEEL CONSCIOUS

ネックウォーマー

本体価格 2,300円 [税込2,484円(8%)]



首もとが冷えてお困りの方に…、

エアーパウダービーズ[®]の保温性と伸縮性に富んだ生地が
デリケートな首周りを柔らかく包み込みあたためます。



ベッドでもご使用いただけます。

ふんわり軽いつけ心地と優れた保温性。
肌触りもやさしいネックウォーマーです。

MOGU[®]ネックウォーマーの中材エアーパウダービーズ[®]は、保温性に優れており人体の熱を逃しません。また、ふんわり柔らかく包み込んでくれるので、肌が弱くマフラーーやセーターなどニットのチクチク感が苦手な方にもご使用いただけます。もちろん、普段の外出時にもお使いいただけます。



使いやすい落ち着いた色合いと
シンプルな形状

フォーマル、カジュアル、アウトドア、
ベッドで…使用シーンを選ばず使いや
すい形状とカラーを用意しました。



軽くてコンパクト 持ち運び便利

外した後も、折りたたんでコートの
ポケットに収納できます。



ロックファスナー(オープンファスナー)

ファスナーは勝手に開くのを防ぐロック式。
取り外しがとても簡単。女性も、お化粧を
気にせず気軽にご使用いただけます。

MOGU[®] ネックウォーマー
[フリーサイズ]



JAN cord	赤	オレンジ	黄	緑	青	黒	グレー
赤	4540323016860	オレンジ	4540323016877	黄	4540323016884	緑	4540323016891
青	4540323016907	黒	4540323016914	グレー	4540323016921		

●組成 / 表地:ナイロン82%、ポリウレタン18% / 中材:エアーパウダービーズ[®](発泡ポリスチレン) ●重量 約65g ●中国製

保温性

MOGU[®]
FEEL CONSCIOUS

イヤーウォーマー

本体価格 **2,100円** [税込2,268円(8%)]

エアーパウダービーズ[®]で、やわらかくてあたたかい!
寒い日のお散歩やジョギングはもちろん、ゴルフにも最適です。

ソフトな感触で耳を包み
しっかり熱を逃さず保温します。

エアーパウダービーズ[®]の優れた流動性と伸縮性の高いスパンデックス生地が、
優しく耳を包み込みます。吸湿性も優れ、いつも快適にご使用いただけます。



キャップの上から装着し、つばに引っ掛けることでより
安定します。



ニット帽の上からもオススメです!帽子もズレにくくな
ります。



髪型に合わせてアクセサリー感覚で使うのもオスス
メです!

補助・温める

MOGU[®] イヤーウォーマー
[フリーサイズ]



JAN cord	赤	オレンジ	黄	緑	青	黒	グレー
4540323016938	4540323016945	4540323016952	4540323016969				
4540323016976	4540323016983	4540323016990					

●組成 /表地:ナイロン82%、ポリウレタン18% /中材:エアーパウダービーズ[®](発泡ポリスチレン) ●重量 約30g ●中国製



体圧
分散

保温性

MOGU[®]
FEEL CONSCIOUS


おやすみあつたかくつ下

本体価格 2,800円 [税込3,024円(8%)]

パウダービーズ[®]の保温力で足先あつたか。
おやすみ時や日常に、ふんわりフィットで足先を温かく包み込みます。
足をぶつけて起こる内出血の予防にも。

足先が冷えてお困りの方にオススメ!
足先ぽかぽか、ふわふわ気持ちいい!
おやすみくつ下。

保温力に優れたパウダービーズ[®]が冷えた足先をあたためます。また、足首部分のゴムが足との隙間を埋め、冷気をシャットアウト! 暖氣を逃しません。伸縮性生地は、インナーにも使われるお肌に優しく通気性の良い生地なので、いつもさらさら気持ちよくお使いいただけます。

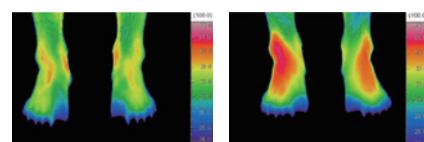

おやすみあつたかくつ下装着直後

装着20分後

ニチカラメンテック株式会社リサーチラボ事業本部調べ

確かにあつたかさ!
パウダービーズ[®]の保温性。

[試験方法] 初期状態の測定部位をサーモグラフ撮影し、おやすみあつたかくつ下を着用後20分間安静に、その後、試験品を脱衣し、再びサーモグラフ撮影を行いました。試験結果は、左記のグラフでもわかるように、装着20分後の足の甲が、徐々に温かくなっているのがわかります。

MOGU[®] おやすみあつたかくつ下
[フリーサイズ]



JAN cord 薄ピンク	4582289838803	薄 黄	4582289838810	薄 緑	4582289838827	薄 青	4582289838834
------------------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------

●組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 約150g(×2) ●中国製

体圧分散

活動補助

姿勢保持

MOGU[®]
FEEL CONSCIOUS

前だおれ防止機能付 ウエストポーチ

一般名：ウエストクッションポーチ ※一般的な用途は、左記の「一般名」で検索ください。



本体価格 **5,600円** [税込6,048円(8%)]

散歩や車イスでの外出の際に、とても便利です。
バックル式で簡単に装着。ベルトの長さを調節して
前倒れ防止にも役立ち安心です。

MOGU[®] クッション付きでおなかを優しく包み込むウエストポーチです。



前倒れが心配な方に

延長ベルトを使用することで、身体の前倒れを防ぐことにもお役に立ちます。パウダービーズ[®]と伸縮性生地により体勢を柔らかく保持します。使用する人に合わせてベルトの長さを調節してください。

※ご本人の意思に沿った、自立支援を促進する目的での使用を想定しています。ご自身で着脱や意思表示ができない場合、ベルトの使用は控えてください。

ちょっとした荷物を入れるのに便利なポーチ、MOGU[®] クッション入りで使い方が広がります。



散歩や旅行、通院に…、
伸縮性生地で取り出し
口が広いため、財布や携
帯電話、診察券などを
さっと取り出せます。



開けやすく
閉じやすい
大きめチャック



取り外し可能な
MOGU[®] クッション

MOGU[®] 前だおれ防止機能付ウエストポーチ
[約横40cm×縦15cm]



JAN card					
赤	4540323015924	黒	4540323015931	青	4540323015948
深緑	4540323015955	グレー	4540323015962		

●組成 / 表地:ナイロン82%、ポリウレタン18% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン) ●重量 / 本体:約215g / 中袋:約95g ●日本製

補助・温める



かわいいペットは
やっぱり癒してくれる～!!

院内で
飼えるよ!



MOGU ペットシリーズ
FEEL CONSCIOUS

もぐっち®シリーズの人気者“み~たん”!
上目づかいで、丸まつた姿は愛きょうたっぷりです!

“ぐるんづ”としたしつぽと
小さな前足がかわいい犬の“わんわん”!



もぐっち®み~たん

本体価格 2,800円 [税込3,024円(8%)]

JAN cord	白 4540323015528	茶 4540323015535	グレー 4540323015559
	黒 4582289834775	ミケ 4540323015542	

[約横29cm×縦24cm×奥行35cm]

- 組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン)
- 重量 約625g ●中国製

ふんわり・まんまる!
かわいい豚のキャラクター



もぐっち®ブー!

本体価格 3,400円 [税込3,672円(8%)]

JAN cord	薄ピンク 4582289833716	黒 4582289834966
----------	--------------------	-----------------

[約横30cm×縦27cm×奥行50cm]

- 組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン)
- 重量 約720g ●中国製

“ボッテツ”として愛きょうたっぷりな
フクロウクッション♪



もぐフク

本体価格 2,100円 [税込2,268円(8%)]

[約横39cm×縦22cm×奥行20cm]

- 組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン)
- 重量 約300g ●中国製



もぐっち®わんわん

本体価格 2,800円 [税込3,024円(8%)]

JAN cord	白 4540323015566	黒 4540323015573	茶 4540323015580
----------	-----------------	-----------------	-----------------

[約横27cm×縦29cm×奥行40cm]

- 組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン)
- 重量 約530g ●中国製

コロコロかわいい♪
まんまるヒヨコのクッション♪



もぐピヨ

本体価格 1,900円 [税込2,052円(8%)]

[JAN cord 4540323012527]

[約横39cm×縦22cm×奥行20cm]

- 組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン)
- 重量 約300g ●中国製

コロコロまんまるなペンギンクッション♪



もぐペコ

本体価格 2,100円 [税込2,268円(8%)]

[JAN cord 4540323018314]

[約横39cm×縦22cm×奥行20cm]

- 組成 / 表地:ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材:パウダービーズ。(発泡ポリスチレン)
- 重量 約300g ●中国製

癒し



MOGU®

セットアップのご提案

MOGU®ケアクッションと
他のMOGU®製品を組み合わせることで
さまざまな状況にも対応できます。
その一部をご紹介します。

セット提案_車イス1



[併用構成]

- MOGU® ウエストクッション (×1)
- MOGU® ネックピロー (×1)

セット提案_車イス2



[併用構成]

- MOGU® ウエストクッション (×1)
- MOGU® ネックウォーマー (×1)
- MOGU® イヤーウォーマー (×1)

セット提案_車イス3



[併用構成]

- MOGU® 体にフィットする穴あき枕 (×1)
- MOGU® 尾骨を浮かすシートクッション (×1)

セット提案_車イス4



- [使用構成]
● MOGU® すきまをうめる多用途クッション (×2)

セット提案_車イス5



- [使用構成]
● MOGU® すきまをうめる多用途クッション (×2)

セット提案_車イス6



- [併用構成]
● MOGU® 尾骨を浮かすシートクッション (×1)
● MOGU® いろいろ便利な穴あきクッション (×3)

セット提案_車イス7



- [併用構成]
● MOGU® 尾骨を浮かすシートクッション (×1)
● MOGU® 前だおれ防止機能付ウエストポーチ (×1)
● MOGU® 腰を楽にするクッション (×1)

セット提案_車イス8



【併用構成】

- MOGU® 背すじをのばす8の字クッション (×1)
- MOGU® いろいろ便利な穴あきクッション (×1)

セット提案_車イス9



【併用構成】

- MOGU® 背すじをのばす8の字クッション (×1)
- MOGU® 体圧分散に優れた四角いクッション (×1)
(別売の「MOGU®すべりにくいカバー」を使用)
- MOGU® 筆記具&食事用グリップ (×1)

セット提案_車イス10



【併用構成】

- MOGU® 背すじをのばす8の字クッション (×1)
- MOGU® ポジショニングに便利な筒型クッション (×1)
- MOGU® 癒しの触感クッション (×1)

セット提案_座位



【併用構成】

- MOGU® 小さく便利な穴あきパッド (×1組)
- MOGU® 癒しの触感クッション (×2)

■ セット提案_ベッド1



【使用構成】
● MOGU® いろいろ便利な穴あきクッション (×7)



■ セット提案_ベッド2



【併用構成】
● MOGU® 体にフィットする
穴あき枕 (×1)
● MOGU® すきまをうめる
多用途クッション (×2)
● MOGU® いろいろ便利な
穴あきクッション (×5)

■ セット提案_ベッド3



【併用構成】
● MOGU® 気持ちいい保冷
まくら (×1)
● MOGU® いろいろ便利な
穴あきクッション (×2)
● MOGU® すきまをうめる
多用途クッション (×2)
● MOGU® ロールクッション
(×2)
● MOGU®
家族の健康まくら (×1)
※「MOGU®ロールクッション」は、
当社のインテリアカタログもしくは
ホームページをご覧ください。)

■ セット提案_ベッド4



【併用構成】
● MOGU® 気持ちいい保冷
まくら (×1)
● MOGU® いろいろ便利な
穴あきクッション (×2)
● MOGU® 体圧分散に優れた
四角いクッション (×2)
● MOGU® すきまをうめる
多用途クッション (×2)
● MOGU®
家族の健康まくら (×1)

セット提案_ベッド5



【併用構成】

- MOGU® 体位変換に使いやすい筒型クッションロング (×1)
- MOGU® ポジショニングに便利な筒型クッション (×1)
- MOGU® すきまをうめる多用途クッション (×1)
- MOGU® 家族の健康まくら (×1)

セット提案_ベッド6



【併用構成】

- MOGU® 頭と上半身を支えるクッション (×1)
- MOGU® ポジショニングに便利な筒型クッション (×2)
- MOGU® 癒しの触感クッション (×2)

セット提案_ベッド7



【併用構成】

- MOGU® 小さく便利な穴あきパッド (×1組)
- MOGU® ポジショニングに便利な筒型クッション (×2)
- MOGU® もぐフク (×1)
- MOGU® 家族の健康まくら (×1)

セット提案_ベッド8



【併用構成】

- MOGU® 気持ちいい抱きまくら (×1)
- MOGU® 体にフィットする穴あき枕 (×2)
- MOGU® いろいろ便利な穴あきクッション (×2)
- MOGU® すきまをうめる多用途クッション (×2)

■ セット提案_ベッド9



【併用構成】

- MOGU® 気持ちいい抱きまくら (×1)
- MOGU® 体圧分散に優れた四角いクッション (×1)
- MOGU® 療しの触感クッション (×2)

■ セット提案_ベッド10



【併用構成】

- MOGU® 体位変換に使いやすい筒型クッションロング (×1)
- MOGU® ポジショニングに便利な筒型クッション (×1)
- MOGU® 体圧分散に優れた四角いクッション (×1)
- MOGU® 家族の健康まくら (×1)

■ セット提案_ベッド11



【併用構成】

- MOGU® 気持ちいい抱きまくら (×1)
- MOGU® すきまをうめる多用途クッション (×2)

■ セット提案_ベッド12



【併用構成】

- MOGU® すきまをうめる多用途クッション (×1)
- MOGU® もぐっち®わんわん (×1)
- MOGU® もぐっち®みーたん (×1)
- MOGU® もぐビヨ (×1)
- MOGU® 家族の健康まくら (×1)

製品の取り扱いについて

日常のお手入れ

ご使用される方の体重・使用頻度・使い方により耐久期間は異なりますが、正しい取扱いを行って頂くことにより商品寿命を延ばすことができます。取扱いの基本として以下を守ってください。

- 直射日光が当たる場所に置かない
- こまめに風通しの良い日陰で十分に乾燥させる
- カバー付きの製品は定期的にカバーを洗濯する

その他、取り扱いの詳細につきましては下記をご参考ください。

① 製品の置き場所

- 直射日光の当たる場所や、ストーブ・ファンヒーターなどの暖房機器から離して置いてください。熱源に近づけ過ぎると生地が燃えたり、変色したり、中のビーズが軟化変形する恐れがあります。
- ホットカーペットや床暖房の上で使用するときは必ず温度調節を「弱」にしてください。
- ファスナーの引き手は必ず隠してください。引き手を出したままにすると床を傷つける恐れがあります。
- 長時間同じ場所に置いたままにすると、床や本体や壁などの間にカビが発生したり、ダニが発生することがあります。

② 使用上の注意

- 製品の上で飛んだり跳ねたりしないでください。また座るときに飛び乗らず、ゆっくりと腰をおろしてください。安定をくずして転倒しケガにつながったり、過度の荷重や衝撃を与えることにより破損することがあります。
- 銳利なものを製品の近くに置いたり乗せたりしないでください。またポケットにペン等の先のとがった物を入れて座らないようにしてください。カバーが破損しビーズがこぼれだし、付近に舞うことがあります。
- 割れ物や貴重品をソファの上に乗せないでください。落下して破損する場合があります。
- 製品を移動させる際には、出来るだけ床面との摩擦を避けるように持ち上げて移動させてください。
- 生地にはポリウレタン糸を使用しています。ポリウレタン糸の特性上、伸縮性や生地の強度が使用と共に低下し、徐々に伸縮性が低下してきます。また、ポリウレタンは熱に弱い繊維です。アイロンのご使用はお避けください。
- 汗や湿気が内部にたまったり、皮脂・化粧品・ハンドクリームなどが付着したまま使用を続けると脆化しやすくなります。特に汗が付着したまま直射日光による紫外線にさらされたり、熱が加わるといっそう脆化が進みます。

③ ビーズが漏れたときは…

- 側生地が破損するなどしてビーズが漏れた場合は、直ちに使用を中止し、破れた箇所をゴムで縛る、または粘着テープ等で破れ部分を塞ぎ応急処置をしてください。特殊な針を使用し縫製しております。家庭用ミシン等では破れ部分縫い閉じることはできません。
- 漏れたビーズは非常に細かく静電気を帯びて衣料品や物に付着し、取り除くことが難しくなります。付近が水で濡れても大丈夫かどうか確認の上で、霧吹きなどでビーズを軽く濡らしてから布等で拭き取ってください。粘着テープなどで取り除いていただくことも可能ですが。掃除機の使用については故障の原因となりますので、使用を控えてください。
- ビーズが目や鼻に入った場合は流水でよく洗ってください。
- 万一、ビーズを誤飲しても、無害で消化されずに排出されますが、状況に応じて医師に相談してください。

MOGU®は消耗品です。「生地が伸び、全体的にくたびれている」、「生地が薄くなり、ポロポロと剥がれてきている」といった状態であれば、製品の寿命ですので買い替えをおすすめします。



MOGU_®では、洗濯を行うことをおすすめしていませんが、洗濯が必要な際には以下の手順で行ってください。

洗濯方法について

1 手洗い



- 水温30°C以下で、やさしく手洗いをしてください。
- 塩素系漂白剤や蛍光剤の入った洗剤はポリウレタン糸を劣化させるため使用できません。また、部分洗い用洗剤等の漂白剤は、より影響度が大きいため注意が必要です。
- つけ置きは避けてください。変色の原因になります。
- 洗濯後は十分にすすぎを行い、洗剤を残留させないようにしてください。
- お風呂の残り湯を使った洗濯はカビの原因になります。必ず綺麗な水で洗ってください。

2 洗濯機で脱水



- 濡れたまま放置されると、繊維の劣化に繋がります。速やかに遠心脱水をしてください。
- 脱水には必ずネットを使用し、長時間の脱水は避けてください。生地が破れ、ピーズが漏れ出すと洗濯機の故障の原因になります。
- タンブラー乾燥は避けてください。

3 日陰干し




- 形を整えて、陰干しをしてください。
- 乾燥が不十分な場合、カビが発生する原因となります。
- 直射日光が当たる場所には長期間放置しないでください。生地に使用しているポリウレタン糸の繊維が劣化しやすくなります。
- ハンガー等に掛けて干すと、接触部の生地が伸びる原因になります。

⚠️ ドライクリーニングはできません。

カバーの洗濯について

製品と同様、洗濯方法の手順・注意事項を守っていただき、ファスナーを閉じて洗濯してください。

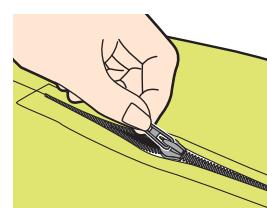

ご注文ガイド

MOGU®ケアクションは
お電話・FAXでのご注文を承っております。

お電話でのご注文方法

MOGU®ケアクション ご注文フリーダイヤル

モ グ ヨ イ ワ
0120-609-410

[受付時間] 平日9:00~18:00 (土日祝・お盆・年末年始休)

お電話でのご注文の流れ



① ご購入希望商品の選択

全商品は本カタログからご覧いただけます。

② ご注文フリーダイヤルへ電話をかける

ご希望の商品がお決まりましたら、MOGU®ケアクションご注文フリーダイヤル
(0120-609-410)へお電話ください。

お電話でのご注文受付時間は、平日の9:00~18:00となっております。

※土・日・祝・お盆・年末年始は、ご注文を受け付けておりません。何卒ご了承ください。

③ オペレーターへご注文

オペレーターへご希望の商品をお伝えください。
商品のお届け先をご確認させていただきます。

④ 商品の発送到着・代金のお支払い

ご注文を受付後、通常2営業日以内に商品を発送させていただきます。
商品到着時に、宅配業者へ商品代金をお支払いください。

FAXでのご注文方法 ①

MOGU®ケアクション ご注文FAXダイヤル

0794-73-2117

[受付時間] 24時間受付(土日祝・お盆・年末年始休)

● FAXでのご注文の流れ



① ご購入希望商品の選択

全商品は本カタログからご覧いただけます。

② ご注文用紙のご記入

本カタログP.93にございます「**FAXオーダーシート**」へ、ご希望の商品やお届け先情報など必要事項をご記入ください。

③ FAX送信

必要事項を全てご記入いただきましたら、MOGU®ケアクションご注文FAXダイヤル(**0794-73-2117**)へ注文用紙をFAXしてください。

※ご注文の際は、記入漏れなどありませんよう、ご注意ください。記入漏れのある場合、ご注文受付ができないことがあります。

④ 商品の発送到着・代金のお支払い

ご注文を確認後、通常2営業日以内に商品を発送させていただきます。
商品到着時に、宅配業者へ商品代金をお支払いください。

FAXでのご注文方法 ②

● FAXオーダーシートの書き方

黒のボールペンまたはサインペンで、はっきりとご記入ください。
記入間違いや記入漏れなど、FAX送信前にもう一度ご確認ください。
特に、お電話番号、ご希望の商品名を必ずお確かめください。

FAXオーダーシートの記入例

ご注文日をご記入ください。

お電話番号は必ず市外局番からご記入ください。
※携帯電話番号はご連絡での確認用を目的としてご利用いたします。

FAX送信方向
本シートを切り取るあるいはコピーしてご使用ください。

MOGU ケアクッション
FAXオーダーシート

●ご注文日 1月 23日

※太枠部分のみご記入ください。
2枚以上のご注文はこちらに連番番号をご記入ください。
1枚目 / 3枚中

宛名 山田 太郎 様
電話番号 0123-45-6789 携帯電話番号 012-3456-7890 FAX番号 0123-45-9876

ご住所 123-4567 ○○県○○○市○○○○町 123-45

●ご注文商品 本体価格と合計金額は、全て「税込」でご記入ください。

商品名	色	本体価格(税込)	数量	合計金額(税込)
尾骨を浮かすシートクッション	赤	¥4,104	2	¥8,208
尾骨を浮かすシートクッション	赤	¥4,104	1	¥4,104
体にフィットする穴あき枕	赤	¥2,052	2	¥4,104
体にフィットする穴あき枕	青	¥2,052	2	¥4,104
体にフィットする穴あき枕	茶	¥2,052	2	¥4,104
すきまをうめる多用途クッション	青	¥2,052	1	¥2,052
すきまをうめる多用途クッション	茶	¥2,052	1	¥2,052
いろいろ便利な穴あきクッション	赤	¥2,376	2	¥4,752
いろいろ便利な穴あきクッション	オレンジ	¥2,376	2	¥4,752
いろいろ便利な穴あきクッション	緑	¥2,376	2	¥4,752

●ご注文ありがとうございます。上記の商品の代金ですが下記のとおりになります。

■1回のご注文につき、お届け先ごとに別途、配達手数料、代引手数料が掛かります。
※配達手数料・代引手数料は「ご注文ガイド(P.97)」をご覧ください。

MOGU ケアクッション ご注文FAXダイヤル
0794-73-2117

※番号はおかげ間違いないようご注意ください。
※ご注文の前に「商品名」「数量」にお間違いがないかも一度ご確認ください。

1回のご注文でFAXオーダーシートが2枚以上になるご注文の際にご記入してください。
例えば、合計送信枚数3枚のうち1枚目の場合は1/3とご記入ください。

ご注文商品1項目につき1色ずつご記入ください。
色・価格・数量のお間違えないようご確認ください。

本体合計金額(税込)
代引手数料
配達手数料
お支払い合計金額



最終のご確認 (ご注文後のキャンセルはお受けできない場合がございます。ご注意ください。)

ご注文を確認しますと、直ちに出荷作業に入りますので、ご注文の取り消しをお受けすることができない場合がございます。ご発注内容をお間違えないようお願いいたします。

FAX送信方向

本シートを切り取るあるいはコピーしてご使用ください。



MOGU®ケアクッション
FAXオーダーシート

※太枠部分のみご記入ください。

●ご注文日

月 日

2枚以上のご注文は
こちらに通し番号を
ご記入ください。

枚目 / 枚中

●宛名

※法人のお客様は、
店名・現場ご指
当者名など詳しく
ご記入ください。

様

●電話番号

●携帯電話番号

※差し控えなければ
ご記入ください。

●FAX番号

●ご住所

□□□-□□□□

●ご注文商品

本体価格と合計金額は、全て「税込」でご記入ください。

	商 品 名	色	本体価格(税込)	数 量	合計金額(税込)
例	尾骨を浮かすシートクッション	赤	¥4,104	2	¥8,208
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

- 土曜・日曜・祝日のご注文は、翌営業日の受付とさせていただきます。
- ご注文を確認しますと、直ちに出荷作業に入りますので、ご注文の取り消しをお受けすることができません。

- 1回のご注文につき、お届け先ごとに別途、配送手数料、代引手数料が掛かります。

※配送手数料・代引手数料は「ご注文ガイド(P.97)」をご覧ください。

MOGU®ケアクッション ご注文FAXダイヤル

0794-73-2117

※番号はおかげ間違いないようご注意ください。

※ご注文の前に「商品名」「数量」にお間違いがないかもう一度ご確認ください。

- ご注文ありがとうございます。上記の商品の代金ですが下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。

本体合計金額(税込)	
代引手数料	
配送手数料	
お支払い合計金額	

お買い求め忘れはございませんか？

1枚のシートに書ききれない場合は
複数のシートに分けて、
通し番号をご記入ください。

MOGU®ケアクッショングラス注文FAXダイヤル

0794-73-2117

番号はおかげ間違いのないようご注意ください。



MOGU
FEEL CONSCIOUS

Modern Global Utility
Feel Conscious

インターネットでのご注文方法 ①

● インターネットでのご注文の流れ

① インターネット検索ソフトに



を入力して検索 もしくは、QRコードをスキャン

② MOGU公式HPトップページの「MOGUストア」にアクセス



③ MOGU直営オンラインショップ「MOGUストア」にて、ご希望の商品をご購入いただけます。

MOGU直営オンラインショップ
MOGU Store
FEEL CONSCIOUS



インターネットでのご注文方法 ②

本冊子掲載のMOGU®ケアクッションの他に
インテリアクッションもご購入できます。



さまざまな商品を取り扱っておりますので
MOGU®ケアクッションと同時にご注文いただけます。

商品代金のお取扱いについて

商品代金1万円(税込)以上ご購入の方は、代引手数料・配達手数料は「無料」です。

※沖縄本島・離島地域は、1万円以上ご購入されても配達手数料が掛かります。

● お支払い方法 代金引換 ※ご注文主様のご住所とお届け先が異なる場合、お届け先にてお支払いただることになります。

商品お届けの際に、運送会社宛に一括して現金にてお支払いください。代金総額[商品金額合計(税込)+配達手数料(税込)]に別途、代引手数料が必要です(お客様のご負担となります)。

代金総額(税込)	代引手数料
1万円未満	324円 (本体価格300円 消費税等24円)

※税率8%の場合での価格です。

※インターネット直営オンラインショップ「MOGUストア」でのご注文の場合は、クレジットカード払い・コンビニ決済・銀行振込でのご購入もできます。(銀行振込の場合、振込手数料はお客様のご負担となります。)

● 配送手数料について

商品をご注文いただいた際の配達手数料は下表の通りです。

※1回のご注文につき、お届け先ごとに配達手数料が掛かります。

※分納を指定される場合は、都度配達手数料をいただきます。

※税率8%の場合の価格です。

2017年10月1日より配達手数料を改訂いたしました。

全 国 (北海道・沖縄本島・離島地域を除く)	北 海 道 ・ 沖 縄 本 島	離 島 地 域
864円 (本体価格800円 消費税等64円)	2,700円 (本体価格2,500円 消費税等200円)	3,780円 (本体価格3,500円 消費税等280円)

※税率8%の場合での価格です。

商品代金1万円(税込)以上ご購入の方は、代引手数料・配達手数料は「無料」です。

※沖縄本島・離島地域は、1万円以上ご購入されても配達手数料が掛かります。

● 消費税について

本カタログ内の税込価格は、消費税率8%にて算出した価格を表記しております(2017年10月現在)。

税法などの改正があった場合は、その税率に応じて税込価格を変更させていただきます。あらかじめご了承ください。

● 領収書について

ご希望に応じて、発行いたします。

商品の不備について

万一お届けした商品がご注文の品と異なる、または商品などが不足している、破損・汚損などがあるなど、商品に不備がございましたら、直ちに交換させていただきますので、恐れ入りますが商品名・ご購入日をご確認の上、カスタマーサービス(フリーダイヤル 0120-609-410)までご連絡ください。

？よくあるお問い合わせ

Q 製品の一部に指が入る程の穴があるのですが
縫製の不良ですか？


A 製品の中材にパウダービーズ[®]を入れる際の入り口部分です。封入部分を中材が漏れないよう、口を閉じて中に入れております。仕様上問題はございません。また、このタイプのクッションは中身のビーズを減らす、増やすことができません。予めご了承くださいませ。



Q ファスナーの取っ手がない製品があるのですが不良ですか？

A ファスナー部分は製品の中材にパウダービーズを入れる際の入り口部分です。ビーズの流出を防ぐため、2重ファスナーになっており、外側のファスナーは簡単に開封できないよう手で引く金具をわざとはずしています。ビーズの補充の際は、以下の方法でファスナーの開封を行ってください。また、内側のファスナーを一気に開きますとビーズが漏れ出してしまうため、開封はゆっくり行ってください。

< 本体ファスナーの構造と補充時の開閉方法について >

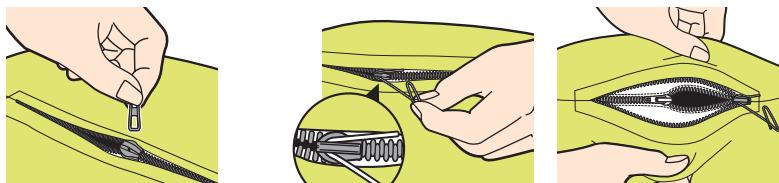

ファスナーは2重になっています。外側のファスナーは開封防止のため、手で引く金具をわざとはずしています。これを「ロックファスナー」といいます。

そのままでは開きませんので、クリップ等を金具の穴に通し引っ張ってください。内側の白いファスナーは金具がついていますので、手で開いてください。

Q 生地が破れ、ビーズが漏れ出した場合の応急処置はどうすればよいですか？

A 破れた箇所をつまんで、輪ゴム等でしばってください。針などで縫われると使用していくうちに生地が引っ張られ、針穴からビーズが漏れてきますので、おすすめできません。ビーズが漏れた際の処置については本書中面の「日常でのお手入れ③ビーズが漏れたときは…」を御覧ください。

Q 生地が破れた場合、修理などの対応はできますか？

A 生地が破れた場合、商品の特性上修理することはできません。ご使用を中止してください。また、長らくご愛用頂いておりますMOGU[®]の修理のご依頼についても、お断りさせていただいております。何卒ご理解のほどよろしくお願いします。

Q ビーズを飲み込んだときはどうしたらよいですか？

A ビーズは危険な物質ではありませんので飲み込んだ場合消化されずに排泄されますが、すぐに吐き出し、口の中を洗浄してください。もし異常を感じた場合は、直ちに専門医の手当てを受けてください。

Q 製品本体を洗濯しても大丈夫ですか？

A MOGU[®]では、本体の洗濯を行うことをおすすめしておりませんが、洗濯が必要な際には本書中面の「洗濯方法について」で必ず行ってください。

商品について不備ございましたら、カスタマーサービスまでご連絡ください。

カスタマーサービス
フリーダイヤル 0120-609-410

[受付時間] 平日9:00~18:00 (土日祝・お盆・年末年始休)

Corporate Philosophy 企業理念

1. Quality of life

株式会社MOGUは人間への深い理解と豊かな創造力でクオリティ・オブ・ライフの向上に努めます。

クオリティ・オブ・ライフ (Quality of Life) とは

『生きるための質の向上』という意味です。

生活の豊かさや健康、安全、ゆとり、仕事、趣味、人とのふれあいなどを通じて得られる人生のさまざまな喜び、さらには地球上のすべての生命の大切さという広い意味を込めた言葉です。

—企業は人間の幸せのために存在する—

これがすべての原点です。

株式会社 MOGU は人間への温かな理解と愛情を持ち、その上で創造的な技術力と企画力・マーケティング力を磨いて、本当の価値を生み出す企業となります。

Corporate Profile 会社概要

社　名 株式会社 **M O G U**
MOGU CO.,LTD.

設　立 1976年

資　本　金 2,800万円

所　在　地 本社／吉川工場
〒673-1122 兵庫県三木市吉川町西奥1173
TEL (0794) 73-2110 FAX (0794) 73-2117
www.mogus.jp



本社／吉川工場

●2011年9月より、サンキュー株式会社は株式会社MOGUへ社名変更いたしました。

- データ出所 積水化成品工業株式会社
- 参考文献 褥瘡の予防・治療ガイドライン (厚生省老人保健福祉局老人保健課監修・照林社)
褥瘡ケアを知ろう～褥瘡の予防と治療～



MOGU®は人の誕生から晩年に至るまで、人生の時代・世代において
気持ちや体をケアサポートしてくれるものを「MOGU®ライフケアアクション」として、
皆様のお役に立ちたいと考えています。

「いざ」というときに — MOGU®の防災活用



MOGU®クッションは 「浮輪」のように水に浮きます！

比重の小さい素材からなるMOGU®パウダービーズ®が持つ浮力によって、
津波などの水害の防災に非常時応用し、「浮輪として使うことができます」
パウダービーズ®は独立気泡体で、95%以上空気でできているため、ビーズ内に
水が染み込まず浮力を得ることができます

※防災用具として認定を受けている製品ではありません

ケアアクション・インテリアクションは、ネットからでもご注文いただけます。 [MOGU](#) 

MOGU Co., Ltd. 1173, Nishioku, Yokawa-cho, Miki-city, HYOGO 673-1122 JAPAN
Tel.0794-73-2110 Fax.0794-73-2117 ☎ 0120-609-410

MOGU®及びパウダービーズ®は株式会社MOGUの登録商標です。

商標・製品特許 PAT4118151・4505224

○掲載商品の仕様・価格・発売時期・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。○印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。また、数量に限りのある商品もございますので、品切れの場合はご容赦ください。○サイズなど多少の個体差がございます。ご了承ください。